

## Table des matières

<b>Table des matières.....</b>	<b>1</b>
<b>Contenu de la boîte.....</b>	<b>3</b>
<b>Description physique de l'Esytime Evolution .....</b>	<b>4</b>
Face supérieure .....	4
Face inférieure .....	4
Face latérale gauche.....	5
Face latérale droite.....	5
Caractéristiques générales.....	5
Précautions de transport .....	6
Charger les batteries .....	6
<b>Les touches de l'Esytime.....</b>	<b>7</b>
Ligne verticale de 4 touches à gauche (de haut en bas) .....	7
Ligne verticale de 4 touches à droite (de bas en haut) .....	7
Combinaisons acceptées pour générer d'autres fonctions du clavier PC.....	7
<b>Les joysticks de l'Esytime.....</b>	<b>8</b>
Joystick1 .....	8
Joystick2 .....	8
Combinaisons de joysticks .....	8
<b>Les curseurs routines de l'Esytime.....</b>	<b>9</b>
<b>Le clavier braille de l'Esytime .....</b>	<b>10</b>
<b>Démarrage de l'Esytime .....</b>	<b>11</b>
<b>Utilisation avec un lecteur d'écran .....</b>	<b>11</b>
<b>Utilisation avec Esysuite.....</b>	<b>11</b>
<b>Présentation .....</b>	<b>11</b>
-Esyfile .....	11
-Esynote .....	12
-Esyschool.....	12
-Esydico .....	12
-Esydaisy.....	12
-Esyplay .....	12
-Esyweb .....	12
-Esycontact.....	12
-Esycalc .....	12
-Esysudoku .....	12
-Esybomb .....	12
<b>Principe de fonctionnement .....</b>	<b>12</b>

Barre de menu et sous menu _____	13
Boîte de dialogue _____	14
Boîtes liste: _____	14
Arbres: _____	15
Boîtes déroulantes : _____	15
Cases à cocher : _____	15
<b>Les menus indépendants de l'application en cours _____</b>	<b>15</b>
Menu Fenêtre _____	15
Menu Applications _____	16
Menu Outils _____	16
Menu Aide _____	18
Menu Paramètres _____	18
<b>Esyfile _____</b>	<b>24</b>
Menu Fichier _____	25
Menu Edition _____	26
Menu Favoris _____	27
<b>Esynote _____</b>	<b>27</b>
Menu Fichier _____	27
Menu Edition _____	30
Menu Format _____	32
Menu Tableau _____	33
Menu Type de braille _____	34
Menu Lecture _____	34
Menu Mathématique _____	35
Menu Musique _____	35
<b>Esyschool _____</b>	<b>37</b>
Menu Fichier _____	37
Menu Affichage – section devoirs _____	38
Menu Affichage – section emploi du temps _____	39
Menu Section _____	39
<b>Esydico _____</b>	<b>40</b>
Menu Fichier _____	40
Menu Lecture _____	40
<b>Esydaisy _____</b>	<b>40</b>
Menu Fichier _____	41
Menu Edition _____	41
Menu Lecteur _____	42
Menu Lecture _____	42
<b>Esyplay _____</b>	<b>42</b>
Menu Fichier _____	43
Menu Lecteur _____	43
Menu Liste de lecture _____	44
<b>Esyweb _____</b>	<b>44</b>
Présentation Braille dans la page web _____	45
Menu Fichier _____	45
Menu Déplacement sur _____	45
- Début de ligne Braille suivante (P ou Bas) _____	47
Menu Affichage _____	47
Menu Lecture _____	48
Menu Favoris _____	48
<b>Esycontact _____</b>	<b>50</b>
Menu Fichier _____	50
<b>Esycalc _____</b>	<b>51</b>
Menu Fichier _____	51

Menu Calculer _____	52
<b>Esysudoku</b> _____	<b>52</b>
Menu Fichier _____	53
Menu Mode _____	53
<b>Esybomb</b> _____	<b>54</b>
Menu Fichier _____	54
Menu Niveau _____	54
<b>Raccourcis claviers</b> _____	<b>55</b>
Raccourcis globaux _____	55
Raccourcis du menu application _____	55
Raccourcis du menu fenêtre _____	55
Raccourcis d'Esyfile _____	55
Raccourcis d'Esynote _____	56
<b>Caractères Braille informatique 8 points</b> .....	<b>58</b>
<b>Fonctions Braille 10 points</b> .....	<b>64</b>
<b>Edition</b> _____	<b>64</b>
<b>Navigation</b> _____	<b>64</b>
<b>Pavé numérique</b> _____	<b>64</b>
<b>Autres</b> _____	<b>65</b>
<b>Commutateurs</b> _____	<b>65</b>
<b>Le clavier braille uni-manuel</b> .....	<b>66</b>
<b>Mode unimanuel 1 :</b> _____	<b>66</b>
<b>Mode unimanuel 2 :</b> _____	<b>66</b>
<b>Mode unimanuel 3 :</b> _____	<b>66</b>
<b>Mode unimanuel 4 :</b> _____	<b>66</b>
<b>Rappel aux règles du braille littéraire</b> .....	<b>66</b>
<b>Les 63 symboles</b> _____	<b>66</b>
<b>Les chiffres et les signes arithmétiques</b> _____	<b>68</b>
<b>Les symboles composés</b> _____	<b>68</b>
<b>Correspondance des mathématiques avec LibreOffice</b> .....	<b>69</b>
<b>Le menu interne de l'Esytime</b> .....	<b>77</b>
<b>Navigation dans le menu</b> _____	<b>77</b>
<b>Descriptif</b> _____	<b>78</b>
Menu Bluetooth _____	78
Menu Clavier _____	78
Menu Localisation _____	79
Menu Outils _____	79

## Contenu de la boîte

Esytime Evolution est livré avec :

- Un bloc alimentation secteur (Entrée : 100-240V / 50-60Hz, Sortie: 19V - 1,2A).
- Une batterie 10,8V - 5200mAh (56Wh).
- Un adaptateur HDMI - VGA

- Un cordon USB pour utilisation de l'appareil en plage braille.
- Une housse semi-rigide.

## **Description physique de l'Esytme Evolution**

L'Esytme Evolution peut se décrire ainsi :

### **Face supérieure**

La face principale de l'Esytme comporte :

- En son centre, un afficheur braille de 32 cellules de 8 points.
- Au-dessus de l'afficheur braille se trouve le dispositif de routines curseur.
- Au-dessus de ce dispositif un petit trou dans le capot signale la présence du microphone intégré.
- En dessous de l'afficheur braille le dispositif de commande composé de :
  - \* 2 manettes (joystick) de 5 contacts (haut, bas, droite, gauche et central) qui sont situées légèrement en dessous de l'afficheur braille à ses extrémités.
  - \* 2 lignes verticales de 4 touches situées à droite et à gauche de l'appareil nommées de L1 à L8.
  - \* 1 clavier braille combinatoire de 10 touches centré sous l'afficheur braille.
- Dans le coin avant droit se trouve un groupe de 4 Leds, de gauche à droite:
  - 1) L'indicateur Bluetooth.
  - 2) L'indicateur d'alimentation indique que l'appareil est sous tension ainsi que l'état de charge.
  - 3) L'indicateur Wifi s'allume si le Wifi est activé sur l'ordinateur.
  - 4) L'indicateur d'activité du disque dur clignote lorsque des données sont écrites ou lues sur le disque dur.

### **Face inférieure**

La face inférieure comporte 2 glissières permettant de déverrouiller la batterie.

Pour cela maintenir les 2 glissières et exercer une pression sur la batterie vers l'arrière de l'appareil pour l'extraire de son logement.

Pour replacer la batterie il suffit de la faire glisser dans son logement pour qu'elle se verrouille automatiquement.

Attention :

- Si vous devez retirer la batterie, vérifiez que le système est bien arrêté. Le retrait de la batterie lorsque l'appareil fonctionne fait entrer le système dans un mode de réparation qui peut être réalisé seulement avec une souris et un moniteur branché. Le bloc batterie ne doit jamais être démonté, il doit être acheté en tant qu'élément d'un seul tenant.
- Le dessous de l'Esytme peut devenir très chaud. Faites attention en le manipulant lorsque celui-ci est allumé ou lorsqu'il a été utilisé récemment. Une température élevée est normale durant la charge ou l'utilisation. Ne placez pas l'Esytme sur une

surface souple telle qu'un lit ou un canapé pouvant obstruer les orifices de ventilation.

Ne le placez pas sur vos genoux ou une autre partie du corps afin de prévenir tout risque de blessure provenant d'une exposition à la chaleur.

### **Face latérale gauche**

En partant de l'arrière de l'appareil :

- Une prise d'entrée d'alimentation pour l'adaptateur secteur. L'alimentation fournie alimente l'Esytime et recharge son bloc batterie. Pour éviter d'endommager l'esytime et son bloc batterie, utilisez toujours l'adaptateur fourni.

Attention : L'adaptateur peut devenir très chaud. Ne le couvrez pas et tenez le éloigné de vous.

- Un connecteur HDMI permettant le raccordement à un moniteur.

- Un port LAN RJ45 à 8 broches (10/100Mbps) pour câble Ethernet standard de réseau local.

- Un connecteur USB 3.0 maître compatible avec imprimante, scanner, clavier, souris, périphériques de stockage etc ....

- Une grille de ventilation permettant l'expulsion de l'excès de chaleur. Assurez-vous qu'aucun papier, livre, tissu, câble ou autre ne bloque les bouches d'aération afin d'éviter tout risque de surchauffe.

- Un connecteur USB 1.0 périphérique permettant le raccordement de la partie afficheur braille - Clavier de l'Esytime à un autre PC.

### **Face latérale droite**

En partant de l'arrière de l'appareil :

- Un bouton glissière permettant d'arrêter ou de mettre en marche l'appareil, c'est un bouton à une seule position qui se manipule en l'entraînant vers l'avant de l'appareil.

- Un port de sécurité Kensington(r), c'est en fait un trou ovoïde permettant de verrouiller un dispositif antivol.

- 2 connecteurs USB 2.0 maître, compatible avec imprimantes, scanner, clavier, souris, périphériques de stockage etc ...

- Une prise d'entrée microphone et sortie audio combinés.

- Enfin, une fente permettant la mise en place d'une carte SD/SDHC/MMC.

### **Caractéristiques générales**

Esytime est l'intégration d'un ordinateur de type PC et d'une interface braille constituée d'un afficheur braille de 32 cellules et d'un ensemble de touches de commande.

Ces 2 ensembles sont raccordés par une liaison USB interne à l'appareil.

L'interface braille peut être utilisée appareil éteint lorsqu'elle est branchée à un PC. Elle est capable de s'alimenter à partir de sa prise USB externe ou du PC intégré à l'Esytime lorsque celui-ci est en activité.

### **Précautions de transport**

Pour préparer l'Esytime au transport, vous devez l'éteindre et débrancher tous les périphériques externes afin d'éviter d'endommager les connecteurs. Le disque dur étant un disque SSD, il n'y a pas de risque de l'endommager pendant le transport, même si celui-ci est encore en fonctionnement. Pour des problèmes de ventilation, ne transportez pas votre Esytime dans un sac lorsqu'il est en fonctionnement.

### **Charger les batteries**

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie, ainsi que tout bloc batterie optionnel, avant d'entreprendre de longs voyages.

Remarque : L'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'ordinateur et sur une source d'alimentation. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque l'Esytime est en utilisation.

Veillez à charger complètement la batterie (pendant au moins 8 heures) avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée, afin de prolonger sa durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de charge.

## Les touches de l'Esytime

Dans la présentation des touches de L1 à L8 ci-dessous, vous pourrez remarquer deux choses qui vous aideront à mémoriser ces touches.

Les touches L1 et L8 sont les 2 touches les plus proches de l'afficheur braille, L1 à gauche permet de faire reculer l'afficheur braille, tandis que L8 à droite permet de faire avancer l'afficheur braille.

L'ordre des touches de L2 à L7, est le même que celui des touches d'un clavier PC, en partant du haut à gauche (Echappement), puis en descendant la colonne de gauche du clavier, puis de parcourir celui-ci vers la droite. Nous n'avons conservé que les touches les plus utiles pour l'utilisation des boîtes de dialogue.

### Ligne verticale de 4 touches à gauche (de haut en bas)

L1 = Recul afficheur braille

L2 = Echappement, que nous appellerons souvent Echap.

L3 = Tabulation, que nous appellerons souvent tab.

L4 = Majuscule, que nous appellerons souvent maj.

### Ligne verticale de 4 touches à droite (de bas en haut)

L5 = Contrôle, que nous appellerons souvent Ctrl.

L6 = Alt

L7 = Insertion, que nous appellerons souvent ins.

L8 = Avance afficheur braille

### Combinaisons acceptées pour générer d'autres fonctions du clavier PC

L2+L3 = Windows

L2+L4 = Menu contextuel

L2+L6 = Suppr.

L5+L6 = Ctrl+Alt

L3+L4 = Maj+Tab

L3+L5 = Ctrl+Tab

L3+L6 = Alt+Tab

L2+L5 = Ctrl+Echap. Ouverture du menu windows

L1+L2+L3 = Ctrl+Home (Début de document)

L6+L7+L8 = Ctrl+End (Fin de document)

L1+L3 = ctrl+maj+e, permet de lancer Esysuite ou d'y revenir

L1+L4 = Entrée dans le menu interne.

L1+L2 = Alt+Maj+1 (commutation de langue clavier arabe pour version arabe)

L7+L8 = Alt+Maj+2 (commutation de langue clavier US pour version arabe)

La plupart des touches de l'Esytime simulent l'appui sur des touches d'un clavier PC.

A la différence d'un clavier PC, il est inutile de maintenir les touches Ctrl, Alt ou Windows. Un premier appui permet d'enclencher la touche et un second appui permet de relâcher la touche. La relâche sera automatique dans le cas de la frappe d'un autre caractère.

Pour sélectionner l'ensemble d'un texte par exemple (Ctrl+a), il suffira d'appuyer sur la touche Ctrl, puis de la relâcher et de générer la combinaison braille du 'a'.

## Les joysticks de l'Esytime

La plupart des touches de l'Esytime simulent l'appui sur des touches d'un clavier PC.

### Joystick1

Il s'agit du joystick de gauche

Bas = Alt+Alt : Entrée dans la barre de menu

Haut : Entrée dans le menu interne

### Joystick2

Il s'agit du joystick de droite

Gauche = Flèche à gauche

Droite = Flèche à droite

Haut = Flèche en haut

Bas = Flèche en bas

Centre = Entrée

### Combinaisons de joysticks

J1 en Bas + J2 à droite = Bramigraph actif

J1 en Bas + J2 à gauche = Bramigraph inactif

J1 en Bas + L1 = Lecture en coupant les mots en fin d'afficheur braille.

J1 en Bas + L4 = Volume - (Esyplay)

J1 en Bas + L5 = Volume + (Esyplay)

J1 en Bas + L7 = affichage / masquage des balises de texte

J1 en Bas + L8 = Lecture sans couper les mots en fin d'afficheur braille.

J1 en haut + L1 = Connexion au périphérique précédent

J1 en haut + L2 = Connexion au périphérique suivant

### SYNTHESE VOCALE (ESYSUITE)

J1 Gauche + J2 Haut = Lecture vocale paragraphe courant.

J1 Gauche + J2 Bas = Lecture vocale de l'ensemble du texte à partir de la position curseur.

J1 Gauche + J2 Gauche = Lecture vocale du paragraphe précédent.

J1 Gauche + J2 Droite = Lecture vocale du paragraphe suivant.

J1 Gauche + L1 = Lecture vocale ligne précédente

J1 Gauche + L2 = Lecture vocale mot précédent

J1 Gauche + L3 = Vitesse -  
J1 Gauche + L4 = Volume -  
J1 Gauche + L5 = Volume +  
J1 Gauche + L6 = Vitesse +  
J1 Gauche + L7 = Lecture vocale mot suivant  
J1 Gauche + L8 = Lecture vocale ligne suivante

#### LECTEUR MP3 (ESYPLAY ET ESYDAISY)

J1 Droite + J2 Haut = Pause  
J1 Droite + J2 Bas = Lecture  
J1 Droite + J2 Gauche = Fichier suivant  
J1 Droite + J2 Droite = Fichier précédant  
J1 Droite + L1 = Avance importante sur le fichier en cours (pas de 10%)  
J1 Droite + L2 = Avance fine sur le fichier en cours (pas de 3%)  
J1 Droite + L3 = Vitesse - (Esydaisy)  
J1 Droite + L4 = Volume - (Esydaisy)  
J1 Droite + L5 = Volume + (Esydaisy)  
J1 Droite + L6 = Vitesse + (Esydaisy)  
J1 Droite + L7 = Recul fin sur le fichier en cours (pas de 3%)  
J1 Droite + L8 = Recul important sur le fichier en cours (pas de 10%)

### **Les curseurs routines de l'Esytime**

Les curseurs routines de l'Esytime permettent de positionner le curseur dans un texte ou de valider un objet présenté sur l'afficheur braille. Ils sont fonctionnellement équivalents à un clic à la souris sur une interface graphique.

Tout comme le clic à la souris le double clic permet de sélectionner un mot dans un texte et le triple clic un paragraphe.

Un clic simple est réalisé en actionnant la touche située au-dessus de la cellule de l'afficheur braille sur laquelle on veut réaliser l'action.

2 méthodes peuvent être utilisées pour générer un double clic :

- Actionner 2 fois rapidement le même curseur routine.
- Maintenir le joystick de gauche à gauche et actionner en même temps le curseur routine.

Pour générer un triple clic, la seule méthode consiste à maintenir le joystick de gauche à droite et d'actionner en même temps le curseur routine.

Les curseurs routine de l'esytime permettent aussi l'avance et le recul de l'afficheur braille.

Pour reculer l'afficheur braille cliquez sur les 2 premiers curseurs routines en même temps.

Pour avancer l'afficheur braille cliquez sur 2 curseurs routines en même temps en dehors des 2 premiers.

## **Le clavier braille de l'Esytime**

Le clavier braille de l'Esytime est composé de 8 touches et de 2 touches de pouce. Chacune des 8 touches correspondant à un point braille.

Elles sont disposées ainsi : '7 3 2 1 4 5 6 8'

Les 2 touches de pouce sont nommées de gauche à droite '9' et 'A'.

Le clavier braille s'utilise en appuyant et en relâchant simultanément une ou plusieurs touches. Les fonctions ou caractères générés selon la combinaison de touche appuyée seront décrites plus loin dans ce document, pour ne pas surcharger votre entrée en matière :

- Pour la saisie en braille informatique voir : Caractère Braille informatique 8 points,
- Pour toutes les fonctions autres que les caractères disponibles habituellement sur un clavier PC voir : Fonctions Braille 10 points
- Pour l'utilisation du clavier braille en mode uni-manuel voir : le clavier braille uni-manuel.

Certaines de ces fonctions (Ctrl, Alt, Maj, Windows et Insert) sont des modificateurs, ces modificateurs doivent précéder l'appui de la combinaison braille sur laquelle ils s'appliqueront.

Par exemple :

Si vous appuyez puis relâchez la touche I6 (Alt) de l'Esytime (ou la combinaison braille 8A) et qu'après vous appuyez-relâchez la touche L3 (Tab) (ou la combinaison braille 256A), Esytime simulera l'appui l'enchaînement de touches d'un clavier PC Alt appuyé, Tab appuyé, Tab relâché, Alt relâché.

Pour simuler un appui relâche d'une touche Alt il faudra appuyer-relâcher la touche L6 Alt de l'Esytime 2 fois.

En utilisation avec un lecteur d'écran seulement, si vous désirez générer des Alt+Tab en maintenant la touche alt appuyée pour ouvrir le panneau d'applications de Windows, vous devez utiliser d'autres combinaisons pour la touche Alt. Les combinaisons braille 81A (Alt appuyé) et 84A (Alt relâché) permettent de verrouiller l'état de la touche Alt.

Ainsi pour générer Alt appuyé, Tab appuyé-relâché 2 fois et Alt relâché, vous devez réaliser les combinaisons braille 81A, 256A, 256A et 84A.

Le même mécanisme est disponible pour la touche Ctrl avec les combinaisons braille 78A, 781A et 784A.

## Démarrage de l'Esyttime

Pour démarrer l'Esyttime, il suffit de déplacer le bouton glissière situé à l'angle arrière droit de l'appareil, sur le flanc droit.

L'afficheur braille se met immédiatement sous tension et affiche un message du type : '3.16 01-01-2017'.

Après le démarrage du PC, l'applicatif dédié prend le contrôle de l'afficheur braille. Suivant la configuration de l'appareil, ce peut être le lecteur d'écran (NVDA, JAWS, ...) ou le logiciel dédié Esysuite.

## Utilisation avec un lecteur d'écran

L'utilisation d'Esyttime avec un lecteur d'écran n'est pas différente de l'utilisation d'une plage braille traditionnelle.

Pour plus d'information, reportez-vous à la documentation du lecteur d'écran et à celle de son pilote pour Esyttime.

Néanmoins, voici quelques astuces qui vous permettront de passer de l'application Esysuite au bureau ou à toute autre fenêtre et de revenir rapidement à Esysuite.

Lancer l'application Esysuite ou y revenir si elle était déjà lancée : recul afficheur braille + tab (L1+L3) ou Ctrl+Maj+E.

Accéder à la liste des fenêtres ouvertes : Ctrl+Alt+Tab (78A+8A+256A).

Aller sur le bureau : Windows+D (1234A + D) ou Windows+M (1234A + M).

Ouvrir le menu démarrer : Ctrl+Echap (I2+I5). Ou 1234A deux fois de suite.

Consulter la liste [des fonctions braille 10 points](#) pour naviguer dans les menus ainsi que dans les boîtes de dialogues.

## Utilisation avec Esysuite

### Présentation

Esysuite est un logiciel dédié à Esyttime, il intègre plusieurs applications :

#### -Esyfile

Gestionnaire de fichier, il permet la manipulation de fichiers et de dossiers (créer, copier, déplacer, effacer, renommer) et ouvrir des fichiers dont l'extension est connue par une application d'Esysuite.

### **-Esynote**

Outil de prise de note sous les différentes formes de braille (informatique, littéraire, abrégé mais aussi mathématique et musical). En braille mathématique il permet aussi de réaliser des calculs scientifiques élaborés.

### **-Esyschool**

Cahier de texte scolaire permettant :  
de définir une liste de matière et de professeurs,  
de gérer ses devoirs à faire,  
de noter son emploi du temps,  
de mémoriser ses notes et de réaliser des moyennes.

### **-Esydico**

Ensemble de dictionnaires (encyclopédique Français, synonyme, conjugaisons des verbes et aussi Français-Anglais, Français-Allemand, Français-Espagnol, Français-Italien, Français-Hollandais dans les 2 sens. Il est aussi accessible par le menu contextuel d'Esynote, il traite dans ce cas le mot sur lequel se trouve le curseur.

### **-Esydaisy**

Lecteur de document au format Daisy (audio et texte combiné). Il supporte les documents au format Daisy 2 et Daisy 3.

### **-Esyplay**

Lecteur multimédia basé sur une bibliothèque multimédia avec une gestion de listes de lecture et de Webradios.

### **-Esyweb**

Navigateur web, permettant d'accéder à des pages internet simples.

### **-Esycontact**

Gestionnaire permettant d'entrer, classer et retrouver les informations des personnes que vous connaissez (téléphones, mails, adresse...).

### **-Esyscalc**

Calculatrice permettant des opérations simples, elle dispose d'une mémoire, d'un convertisseur monétaire et d'un calculateur financier

### **-Esysudoku**

Jeu dont le but est de remplir la grille en suivant les règles du Sudoku.

### **-Esybomb**

Jeu dont le but est de découvrir une grille sans tomber sur une bombe. C'est le jeu du démineur, connu par tous les utilisateurs de Windows.

## **Principe de fonctionnement**

A son démarrage, Esysuite lance une application, par défaut Esyfile. L'afficheur braille affiche alors le nom du premier dossier du dossier Documents de Windows.

Comme dans tout logiciel sous Window, Esysuite est composé :

- D'une barre de titre,
- D'une barre de menu,
- D'une zone de travail contenant les éléments en cours,

- D'une barre d'état

A ces 4 zones peuvent être ajoutées une fenêtre affichant un simulateur braille et une fenêtre de prévisualisation qui permet de voir graphiquement le contenu de la ligne en cours.

### **Barre de menu et sous menu**

La barre de menu contient toutes les fonctions vous permettant de contrôler Esysuite.

Elle s'adapte au mode de fonctionnement d'Esysuite, certains éléments de menu apparaîtront ou disparaîtront en fonction de l'application active par exemple.

Pour la sélectionner il vous suffit d'actionner le joystick de gauche vers le bas ou encore de déclencher 2 fois la fonction Alt (touche L6).

L'afficheur braille affiche alors:

"Est:Fichier Edition Format Table"

Les lettres marquées du point braille 8 sont les caractères de raccourcis permettant d'actionner la fonction. Ces fonctions peuvent aussi être déclenchées par les curseurs routines situés au-dessus de l'afficheur braille.

Les touches L1 et L8 vous permettent de reculer ou d'avancer la plage braille sur la ligne de menu.

Pour revenir à la zone document sans réaliser de fonction il vous suffit de déclencher la fonction Echappement avec L2.

Une autre façon de se déplacer dans les menus est de déplacer la sélection en utilisant les 4 flèches (joystick de droite de l'Esytime), l'élément de menu sélectionné est présenté en première position sur l'afficheur braille. Il suffit de réaliser la commande entrée pour valider l'élément de menu sélectionné (joystick de droite contact central) ou les deux touches sous le clavier braille. L'inconvénient de cette méthode est que le sens de déplacement dépend de la façon dont les menus sont graphiquement affichés.

L'action sur un objet de la barre de menu entraîne l'affichage du sous menu associé à cet objet. Par exemple pour le menu fichier d'Esynote nous verrons sur l'afficheur braille:

"Fch:Nouveau'Ctrl+N Ouvrir...'Ctr"

Le parcours des sous menus est réalisé de la même façon que pour la barre de menu.

L'affichage d'un élément de sous menu peut être présenté avec son raccourci direct, c'est le cas dans cet exemple pour "Nouveau" associé au raccourci clavier Ctrl+N.

Les éléments de sous menu peuvent être de 4 types :

- Fonction simple, son déclenchement entraîne la réalisation de la fonction.
- Boîte de dialogue, son déclenchement entraîne l'ouverture d'une boîte de dialogue. Le nom de ces éléments est toujours suivi de "...".
- Sous menu, son déclenchement entraîne l'ouverture d'un sous menu, son nom est suivi de ">s".
- Etat, ces éléments représentent un état coché ou non, lorsque l'élément est coché son nom est suivi de ">c". Lorsque l'élément est non coché, son nom est suivi de ">n". Son déclenchement entraîne le changement d'état de l'élément et la fermeture du menu.

Note: Certains éléments de menu peuvent se trouver dans un état grisé qui indique que cette commande n'est pas disponible. Leur nom est suivi de ">g".

### **Boîte de dialogue**

«Le principe de la boîte de dialogue est qu'elle doit être refermée par vos soins en appuyant sur l'un de ses boutons. Le plus souvent Ok ou Annuler ou Oui, Non pour répondre à une question.

Une boîte de dialogue peut contenir différents objets :

- Des textes,
- Des zones éditables,
- Des boîtes liste éditables ou non,
- Des arbres,
- Des boîtes déroulantes,
- Des cases à cocher,
- Des boutons.

Comme pour les menus, il est possible de déplacer l'afficheur braille et de lire l'intégralité de la boîte de dialogue.

Vous pouvez aussi déplacer la sélection d'un objet à l'autre à l'aide des fonctions Tab (touche L3) et Maj+Tab (appui successif des 2 touches L4 et L3). L'objet sélectionné s'affichera en début d'afficheur braille et toute autre fonction agira sur celui-ci.

Manipulation des différents objets :

#### **Boîtes liste:**

Espace : Ouverture de la liste.

Haut - Bas : Parcours de la liste.

Début : Positionnement sur premier élément.

Fin : Positionnement sur dernier élément.

Entrée : Fermeture de la liste avec validation de l'élément de liste actif.

Echappement : Fermeture de la liste sans validation (retour à l'élément avant ouverture de la liste).

### **Arbres:**

Les arbres sont composés de 2 types d'éléments, les nœuds et les feuilles :

- Les nœuds contiennent d'autres nœuds ou des feuilles. Un nœud peut être affiché de façon réduite (son contenu n'est pas visible) ou de façon développée (les éléments qu'il contient sont dans ce cas visibles).
- Les feuilles sont des éléments finaux sans contenu.

Convention d'affichage :

En braille le nom des éléments d'un arbre est préfixé par 2 caractères :

- Le premier caractère peut être 'f' pour une feuille, 'r' pour un nœud réduit et 'd' pour un nœud développé.
- Le second caractère correspond au rang de l'élément dans l'arbre.

Commande :

Haut - Bas : Parcours de l'arbre.

Gauche – Droite sur un nœud : Réduction – Développement du nœud.

Début : Positionnement sur premier élément.

Fin : Positionnement sur dernier élément visible.

Entrée : validation de l'élément actif.

### **Boîtes déroulantes :**

Haut - Bas: Valeur précédente/suivante.

### **Cases à cocher :**

Espace: Changement de l'état coché/décoché.

## **Les menus indépendants de l'application en cours**

### **Menu Fenêtre**

Le menu fenêtre permet :

- De basculer d'un document ouvert à l'autre.
- De configurer l'aspect graphique de l'application.
- D'activer-désactiver l'affichage du simulateur braille et de la fenêtre de prévisualisation.

Le simulateur braille est une fenêtre graphique qui vient se placer en bas de l'application (Elle peut être détachée et déplacée à la souris). Elle affiche l'afficheur braille sous forme de combinaisons braille graphique et sous forme de caractères correspondants.

La fenêtre de prévisualisation est une fenêtre qui fonctionne avec Esynote, elle permet de voir sur un écran la traduction graphique de la ligne courante d'Esynote. Cette fenêtre est très utile à un voyant qui peut voir en clair et au fil des modifications une formule mathématique ou du texte abrégé.

## **Menu Applications**

Le menu applications permet de lancer une des applications d'Esysuite, ce menu contient aussi les fonctions d'arrêt, de mise en veille ou de redémarrage du système.

## **Menu Outils**

Le menu outils contient un ensemble d'utilitaires permettant de consulter l'état de la batterie, la date et l'heure, d'éjecter une clef USB, de lancer une procédure de prise en main à distance, de placer l'Esytime en mode examen et de lancer un programme de test de l'afficheur braille.

### *Batterie*

Le menu batterie affiche le pourcentage restant de la capacité de la batterie et la source d'alimentation utilisée par le système, "sur batterie" lorsque la batterie est utilisée et "sur secteur" lorsque le bloc d'alimentation externe est branché. Une action sur ce menu affichera une boîte de dialogue vous donnant plus d'information sur l'alimentation de l'appareil (présence de l'alimentation externe, état de la charge...)

### *Date et heure*

Le menu date et heure affiche la date et l'heure du système, une action sur ce menu permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle les heures minutes et secondes peuvent défiler en direct.

### *Démarrer TeamViewer*

TeamViewer permet à une personne disposant lui aussi du logiciel TeamViewer de prendre en main votre Esytime lorsque vous lui fournissez un id et un mot de passe. Le menu « prise en main à distance » démarre le logiciel TeamViewer préinstallé sur votre Esytime. Une boîte de dialogue vous demande de confirmer que vous voulez bien démarrer TeamViewer. Si vous confirmez en appuyant sur le bouton 'Oui', TeamViewer démarre et une boîte de dialogue s'ouvre pour vous indiquer votre id et votre mot de passe.

### *Mode examen*

Cette commande permet d'utiliser Esytime pour passer un examen.

C'est à l'examineur de passer l'appareil dans ce mode. Pour ce faire il devra disposer d'un écran, d'une souris USB et d'un clavier USB s'il n'est pas accoutumé au clavier braille de l'Esytime.

Lorsque Esytime démarre en mode examen, les lecteurs d'écran ne peuvent plus être utilisés.

- Nvda et Jaws sont refermés si Esysuite est lancé en mode administrateur (il faut pour cela une image disque postérieure à février 2013).

- Le logiciel Esysuite ne dispose plus des applications Esysplay, Esysweb, Esysdaisy, Esysdico et Esyscalc.
- La boîte de dialogue ouvrir/importer et l'application Esysfile n'ont accès qu'à la clef USB et à un dossier sur disque dur nommé "exam" qui est vide.
- La liste des fichiers récents d'Esynote est vidée (pour éviter l'accès aux fichiers de cette liste).
- Le démarrage de TeamViewer n'est plus possible.
- Le système de plugin est désactivé.

#### *Entrer en mode examen :*

Actionner la commande "mode examen". Une boîte de dialogue vous demande de confirmer votre choix. Si vous répondez 'oui', vous devrez définir un mot de passe qui vous permettra de quitter le mode examen. Une fois le mot de passe entré, Esysuite se ferme, l'examineur doit vérifier la présence de lecteur d'écran et les refermer manuellement si besoin. Il faut ensuite relancer Esysuite pour être en mode examen effectif.

#### *Quitter le mode examen :*

Actionner la commande "mode examen". Une boîte de dialogue vous demande de confirmer votre choix. Si vous répondez 'oui', vous devrez fournir le mot de passe pour pouvoir quitter le mode examen. Une fois le mot de passe entré, Esysuite redémarre l'Esyttime.

Remarque : Si l'examineur oublie le mot de passe, il doit supprimer à la main le fichier esysuitepwd.tmp dans le dossier Document de l'utilisateur.

### ***Ejecter la clef USB***

Le menu Ejecter la clef USB est grisé tant qu'aucune clef, SD-Card ou disque dur amovible n'est détecté. Dans le cas contraire, ce menu ouvre un sous menu contenant la liste des périphériques déconnectables. Une action sur un de ces sous-menus déclenche le processus de démontage de l'unité amovible dont le résultat vous sera communiqué par une boîte de dialogue.

### ***Test***

Ce menu donne accès à 3 fonctions de test de l'afficheur :

par point : Un seul picot se déplace en passant par tous les picots de l'afficheur.

par colonne : 4 picots se déplacent de gauche à droite sur l'afficheur.

par ligne : les points 1,4 puis 2,5 puis 3,6 et enfin 7,8 sont levés cycliquement sur l'ensemble des cellules de l'afficheur.

Il suffit d'appuyer sur une touche quelconque du clavier braille pour que ce fonctionnement s'arrête.

## **Menu Aide**

Ce menu donne accès à :

- La documentation de l'appareil,
- Les coordonnées d'Eurobraille,
- Les caractéristiques d'Esyttime, on trouvera ici le numéro de version du logiciel Esysuite ainsi que le numéro de série et la version du clavier de l'appareil
- La vérification des mises à jour, Dans le cas où des mises à jour sont disponibles sur internet, elle permet de télécharger la dernière version d 'Esysuite sur le bureau Windows en vue d'une installation ultérieure.

## **Menu Paramètres**

Le menu paramètres regroupe toutes les possibilités de configuration d'Esysuite. Elles sont regroupées par thème dans des boîtes de dialogue accessibles par les sous menus suivants :

### *Paramètres Braille*

3 boîtes de dialogue regroupent tous les paramètres qui concernent la présentation sur l'afficheur braille.

La première boîte de paramètres se réfère à la présentation des objets.

La seconde boîte se réfère à la présentation d'un texte en déterminant le type de balises de texte que l'on veut voir.

Enfin une troisième boîte permet d'afficher un texte HTML avec ou sans ses balises spécifiques.

Liste des paramètres braille de présentation des objets :

- Un enfant par ligne

Lorsque ce paramètre est activé un seul objet enfant est affiché sur la ligne, on aura une présentation du type « père : enfant ». Pour lire l'objet enfant suivant ou précédant, il faudra utiliser les flèches. (la valeur par défaut est non coché)

- Un élément de liste à la fois

Ce paramètre permet d'agir sur la présentation des listes et a le même effet que le paramètre précédant qui lui agissait sur tous les types d'objet. (la valeur par défaut est non coché)

- Balises longues

Ce paramètre agit sur la forme des balises du texte, elles pourront être affichées en toutes lettres ou sous une forme abrégée en une ou deux lettres. Ce paramètre peut être basculé en cliquant sur le dernier caractère d'une balise.

- Raccourcis clavier visibles dans menu

Ce paramètre détermine si le raccourci clavier éventuellement associé à un élément de menu doit être présenté en braille ou non.

- Raccourcis joystick visibles dans menu

Ce paramètre détermine si le raccourci joystick éventuellement associé à un élément de menu doit être présenté en braille ou non.

- Nom de l'élément père long

Une construction d'objet commence par l'affichage de l'objet contenant (père) puis du caractère ' :' suivi des objets enfant. Ce paramètre détermine si l'objet père doit être affiché sous une forme longue ou abrégée.

- Noms des enfants longs

Ce paramètre détermine si les objets enfant doivent être affichés sous une forme longue ou abrégée.

- Le curseur colle au début de plage Braille

Lorsque ce paramètre est activé, Les déplacement de l'afficheur braille sur un texte entraînent le curseur de saisie qui sera placé en début de l'afficheur.

- Lecture sans couper les mots

Ce paramètre a un effet aussi bien sur la présentation d'un texte que d'une liste d'objet. Lorsqu'il est activé, l'afficheur braille est construit de façon à éviter l'affichage du début d'un mot sur la fin de la plage braille. Si le mot ne peut être complètement affiché, il se trouve déplacé en début de l'afficheur braille suivant.

2 commandes clavier permettent également de modifier ce paramètre :

J1 en Bas + L8 = avance sans couper les mots,

J1 en Bas + L1 = avance en coupant les mots.

- Afficher les boutons en premier dans les boites messages

Lorsque ce paramètre est activé, les boutons dans les boîtes de dialogue sont affichés en Braille avant et après le message.

- Clignotement autorisé

Ce paramètre permet de choisir si le curseur et la sélection doivent être indiqués par un clignotement sur l'afficheur braille.

### *Paramètres Vocal*

Ce menu donne accès à 4 boîtes de dialogue qui regroupent les paramètres de la synthèse vocale.

On trouvera:

#### *Paramètre voix :*

- Une liste de voix,

- Un réglage de vitesse de -10 à +10, la position 0 étant la valeur initiale préconisée par le concepteur de la voix.

- Un réglage de volume de 0 à 10 (accessible par les raccourcis Alt+Haut et Alt+Bas)

#### *Conditions de lecture :*

- Une case à cocher "Echo sur l'élément focusé".

- Une case à cocher "Echo dans le texte". Cela a pour effet de vocaliser les zones de textes multi-lignes selon le paramétrage réalisé dans la boîte suivante.

### Echo à la frappe :

- Une case à cocher "Caractère" permet d'activer ou de désactiver la lecture par la synthèse de tous les caractères saisis par l'utilisateur.
- Une case à cocher "Mot" permet d'activer ou de désactiver la lecture par la synthèse de chaque mot formé par la saisie de l'utilisateur.

### Echo sur déplacement de curseur :

- Une case à cocher "Caractère" permet d'activer ou de désactiver la lecture par caractère lors du déplacement du curseur par caractère. (Haut, Bas, Droite et Gauche)
- Une case à cocher "Mot" permet d'activer ou de désactiver la lecture du mot lors d'un déplacement du curseur par mot (Ctrl+Droite et Ctrl+Gauche).
- Une case à cocher "Ligne" permet de déclencher une lecture de ligne à la suite d'un déplacement de curseur de ligne en ligne (Haut et Bas).
- Une case à cocher "Paragraphe" permet d'activer la lecture par paragraphe lorsque le curseur se déplace de paragraphe en paragraphe (Ctrl+Haut et Ctrl+Bas).

### *Paramètres Dossiers*

Ce paramètre ouvre une boîte de dialogue permettant de passer en navigation restreinte.

Ce mode a pour effet de réduire la navigation sur le disque dur en limitant l'accès au dossier Document et à ses sous dossiers ainsi qu'aux disques ou clefs USB connectées. Son effet est visible sur les boîtes de dialogue Ouvrir, Enregistrer sous et Esysfile. (la valeur par défaut est coché)

### *Paramètres Esynote*

Ce menu donne accès à 4 boîtes de dialogue et un élément de menu.

#### Général :

- Le « Type de fichier par défaut » permet de définir le format de fichier qui sera choisi lors de la création d'un nouveau document d'Esynote.
- Le « Type de braille par défaut » permet de définir le type de braille (Informatique, Littéraire, abrégé, Mathématique...) que prendra le premier paragraphe d'un nouveau fichier.
- Le « Type de braille à l'ouverture d'un fichier » permet de définir dans quel type de braille (Informatique, littéraire ou abrégé) seront converties les lignes de texte d'un fichier lors de son ouverture. Ce paramètre agit sur l'ouverture des documents txt, odt, rtf, docx et html.
- Le « Rendu graphique en caractères alphabétiques du braille » permet, lorsqu'un écran est branché à l'Esytyme de voir les caractères braille soit sous forme de points braille soit sous la forme du caractère correspondant. Cet affichage sera pertinent en braille littéraire et informatique mais plus difficile à lire pour un voyant en braille abrégé, mathématique ou musical.

- L' « affichage des boîtes de dialogue d'avertissements » ce paramètre est coché par défaut. En le décochant, l'utilisateur se passe de l'affichage des boîtes de dialogue d'avertissement, notamment lors de l'enregistrement d'un document dans un format autre que le format natif (.mbe).

### Mathématique :

Ce sous menu permet de paramétrer les calculs et l'affichage du résultat.

Paramètres d'affichage du résultat :

Notation : permet de choisir le format d'affichage « Sans format » pour un affichage classique, « Scientifique » pour un affichage en puissance de 10 et « Ingénieur » pour un affichage en puissance de 10 mais modulo 3.

Précision : permet de définir le nombre de décimales après la virgule.

Angle : permet de définir l'unité angulaire utilisée (Degré ou Radian).

Majuscule préfixée : permet lors de la lecture d'un fichier libre office de déterminer si les caractères majuscule doivent être convertis par la combinaison braille majuscule suivie de leurs codes 6 points ou être convertis en une seule combinaison 8 points.

Conserver les marques de bloc à la lecture de fichier .mat : permet lors de la lecture d'un fichier .mat de déterminer si les codes de début de formule (point 6 ou point 6 point 3) doivent être conservés dans la formule mathématique, ou si l'indication du type de braille mathématique suffit.

Marqueurs des milliers dans les nombres : permet lors de la lecture d'un fichier libre office de déterminer si l'indicateur de séparation de tranches de 3 chiffres en braille (point 3) doit être inséré dans les nombres.

### Police par défaut :

- Cette boîte de dialogue permet de choisir le nom de la police par défaut qui sera utilisée lors de la création de nouveau document (Fichier>Nouveau).

### Acquérir du texte :

Ce menu donne accès à 2 boîtes de dialogue:

#### *Ocr*

Cette boîte de dialogue est utilisée pour paramétrer l'OCR (reconnaissance optique de caractère) d'Esynote.

La case à cocher « Rotation automatique » fait pivoter l'image pour que la reconnaissance de caractère fonctionne même si le document est tourné de 90, 180 ou 270 degrés dans le scanner.

La boîte liste « Rotation initiale » indique la rotation à appliquer à la feuille avant de commencer la reconnaissance. Cela permet d'accélérer la reconnaissance d'un document de type livre qui serait tourné à 90, 180 ou 270 degrés sur le plateau du scanner.

Les boîtes liste de langues permettent de définir jusqu'à 3 langues différentes pour faire la reconnaissance de caractère.

### *Sélectionner un scanner*

Cette boîte de dialogue permet de sélectionner le scanner à utiliser (quand plusieurs pilotes de scanner sont installés sur un Esysime)

### *Musique*

Cette boîte de dialogue contient plusieurs éléments :

#### *Mode d'affichage*

Il s'agit d'une boîte liste permettant de choisir la présentation du document :  
Piste par piste, affichera les partitions de toutes les sections d'un morceau de musique pour le premier instrument puis pour chaque instrument successivement.  
Section par section, affichera toutes les partitions de chaque instrument pour la première section du morceau de musique, puis de même pour les sections suivantes.

#### *Pistes par défaut*

Il s'agit d'une boîte de dialogue qui permettra de choisir combien de pistes, (de partitions différentes, par exemple main gauche, main droite pour le piano ou partition pour différents instruments), seront utilisées à chaque fois que l'on entrera en type de braille musical. Il faudra déterminer le nom de la piste, le code braille à indiquer en début de la partition braille, le type d'intervalle utilisé (ascendant ou descendant), La clef à indiquer pour la partition en noir, le canal midi à utiliser, le programme ainsi que la banque midi à utiliser pour le rendu à l'écoute et enfin le volume de la piste.

#### *Bibliothèque des instruments*

Dans cette boîte de dialogue, on pourra consulter, modifier ou ajouter des instruments. Chaque instrument est classé dans une bibliothèque par type d'instrument, et leurs caractéristiques pourront être réglées :

Le code braille à insérer en début de partition braille pour cet instrument,  
La clef à utiliser surtout pour l'affichage en noir,  
le type d'intervalle ascendant ou descendant,  
la transposition pour certains instruments,  
le programme et la banque midi à utiliser pour le rendu sonore à l'écoute.

#### *Réinitialier la bibliothèque*

Il s'agit d'un bouton qui permet de retrouver la bibliothèque des instruments, telle qu'elle a été créée par défaut.

### *Paramètres Esysidico*

Ce paramètre permet de choisir le dictionnaire par défaut qui sera utilisé à chaque ouverture de l'application Esysidico.

### ***Paramètres Esydaisy***

Le paramètre Esydaisy ouverture affiche une boîte de dialogue permettant à Esydaisy d'afficher les ouvrages dans les formes braille Informatique, littéraire ou abrégé.

Ce paramètre est pris en compte uniquement lors de l'ouverture d'un ouvrage par Esydaisy.

### ***Paramètres Esyweb***

Ce menu donne accès à 2 boîtes de dialogue :

#### ***Option de démarrage :***

Cette boîte de dialogue permet de définir la page d'accueil du navigateur web.

#### ***Se faire passer pour un appareil mobile :***

4 cases à cocher permettent de configurer Esyweb pour qu'il se fasse passer pour un navigateur d'appareil mobile Androïd, iPhone, Palm ou Blackberry.

En passant pour un navigateur mobile, le contenu des pages web est souvent plus simple à analyser.

### ***Paramètres Esycontact***

Ce menu donne accès à une boîte de dialogue pour paramétrer l'affichage des contacts.

#### ***Option d'affichage :***

Cette boîte de dialogue permet de choisir les champs des contacts qui seront affichés dans la boîte de dialogue Nouveau contact et Modifier contact. L'option Prénom-Nom ou Nom-Prénom détermine la façon dont sont affichés les contacts dans la fenêtre principale d'Esycontact.

### ***Paramètres Lancement auto***

Ce paramètre ouvre un sous menu contenant la liste des applications disponibles dans Esysuite. Celle qui est cochée sera l'application lancée par défaut lors du démarrage d'Esysuite.

### ***Paramètres Clavier***

- Verrouillage sur application, permet de bloquer un certain nombre de raccourcis clavier qui permettent de changer d'application (Alt+F4 par exemple).
- Verrouillage Bramigraph, permet de bloquer la génération de toutes les touches de fonction au clavier braille. Ainsi toutes les combinaisons braille avec une touche 9 ou A seront ignorées.

2 commandes permettent également de modifier ce paramètre :

J1 en Bas + J2 à gauche : bramigraph verrouillé (fonctions braille 10 points inactives)

J1 en Bas + J2 à droite : bramigraph déverrouillé (fonctions braille 10 points actives)

- Clavier USB-HID à la sortie, si la case est cochée, cela permet de rendre autonome le fonctionnement du clavier braille à la fermeture d'Esysuite. Même sans lecteur d'écran il vous sera alors possible de commander votre système.

### *Paramètres Batterie*

Ce paramètre ouvre une boîte de dialogue qui permet de définir à partir de quel pourcentage de charge vous voulez être prévenu qu'il est temps d'éteindre l'appareil ou de le brancher sur une alimentation externe. Par défaut ce paramètre est réglé à 10%, un bouton « Défaut » vous permet de replacer rapidement cette valeur.

Une fois ce paramètre réglé, une boîte de dialogue apparaîtra dès que le niveau de batterie sera inférieur ou égal à celui défini. Vous aurez alors le choix de refermer cette boîte en choisissant de ne pas la revoir jusqu'à la prochaine extinction de l'appareil, sinon elle s'affichera à nouveau dès que la batterie aura chuté de 1% supplémentaire.

### *Paramètre Langue*

Il comporte 3 sous menus :

#### *Interface*

Ce paramètre permet de changer la langue des menus et boîtes de dialogue de l'application Esysuite.

#### *Mathématique*

Ce paramètre permet de modifier le code braille utilisé pour la saisie des formules en braille mathématique ; les deux choix sont :

Français, conforme à la notation mathématique braille, document réalisé par la commission pour l'évolution du braille français, publié en janvier 2007, Nemeth, conforme au braille mathématique utilisé principalement en Amérique du Nord.

#### *Braille*

Ce paramètre permet de choisir la table braille utilisée pour la saisie et la lecture.

### *Paramètres par défaut*

Cette commande ouvre une boîte de dialogue dans laquelle il vous sera proposé de réinitialiser tous les paramètres d'Esysuite. Vous pourrez confirmer en validant le bouton « oui » ou annuler cette action en validant le bouton « non ».

### **Esyfile**

Esyfile est un gestionnaire de fichiers qui vous permet de réaliser les principales opérations sur vos documents (créer, rechercher, copier, déplacer, renommer...)

Esyfile est aussi un moyen rapide d'ouvrir vos documents avec les différentes applications d'Esysuite. Dans ce cadre, vous pouvez définir Esyfile comme

application lancée au démarrage (voir paramètres>Lancement auto) et l'utiliser en substitution à fichier>Ouvrir et Fichier>Nouveau d'Esynote. Il s'agit du choix par défaut dans Esysuite.

Esyfile est constitué d'une liste contenant les dossiers et les fichiers d'un répertoire. Les quelques fonctions ci-dessous vous permettrons de vous déplacer dans les répertoires :

Haut - Bas : Parcours des éléments de la liste.

Début : Positionnement sur le premier élément.

Fin : Positionnement sur le dernier élément.

Entrée : Sur un dossier, Affiche la liste du contenu du dossier.(On descend d'un niveau de l'arborescence des répertoires du disque.)

Sur un fichier, ouvre le document si son type est reconnu par Esyfile.

Correction : Affiche le contenu du dossier parent. (On remonte dans l'arborescence du disque).

## **Menu Fichier**

### ***- Nouveau (Ctrl+N)***

Ouvre un menu vous permettant de créer un nouveau dossier ou un document d'Esysuite. Une fois avoir sélectionné la commande que vous souhaitez, il ne vous reste plus qu'à définir le nom de l'élément à créer.

### ***- Envoyer vers***

Cette commande vous permet de copier votre sélection vers l'unité disque de votre choix. Elle est essentiellement utilisée pour copier des fichiers ou dossiers vers une clef USB.

### ***- Déplacer vers***

Cette commande réalise une opération identique à « Envoyer vers » avec un effacement des fichiers ou dossiers source.

### ***- Supprimer (Suppr.)***

Cette commande efface la sélection courante, Attention : Esysuite ne gère pas de corbeille, cette commande est donc irréversible.

### ***- Renommer (F2)***

Cette commande permet de renommer un fichier ou un dossier, elle ne fonctionne pas sur des sélections multiples.

Attention : Esysuite ne gère pas de corbeille, cette commande est donc irréversible.

### ***- Propriétés (Alt+Entrée)***

Cette commande ouvre une boîte de dialogue affichant les propriétés du dossier ou du fichier sélectionné.

### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme l'application Esyfile.

### **- Rechercher (Ctrl+F)**

Ouvre une boîte de dialogue qui contient une zone éditable permettant de taper le ou les mots à rechercher et une liste qui contient les résultats de la dernière recherche réalisée.

Vous pouvez passer d'un objet à l'autre à l'aide de la fonction Tab.

Lorsque vous lancez une recherche en tapant un mot puis Entrée, la liste des documents trouvés est immédiatement accessible, vous pouvez ainsi la consulter même si la recherche n'est pas terminée. Cela vous permet d'arrêter la recherche si le document que vous cherchiez se trouve déjà dans la liste.

En fin de recherche, une boîte de dialogue vous prévient que celle-ci est terminée.

Le bouton "Afficher le dossier contenant le fichier" vous permet d'afficher le dossier qui contient le fichier ou dossier sélectionné dans la liste des fichiers trouvés.

## **Menu Edition**

### **- Chemin (Ctrl+H)**

Ouvre une boîte de dialogue contenant une ligne d'édition qui présente le chemin courant du dossier présenté.

Une aide vous est apportée lors de la modification de cette adresse, il suffit de taper un '\' par exemple puis à l'aide des fonctions haut, bas, vous pouvez consulter la liste des dossiers proposés.

### **- Couper (Ctrl+X) - Copier (Ctrl+C) - Coller (Ctrl+V)**

Ces 3 commandes permettent d'utiliser le presse papier pour copier/déplacer les fichiers ou dossiers sélectionnés.

### **- Débuter la sélection (F8)**

Cette commande permet d'entrer en sélection multiple.

Un élément de liste est présenté sélectionné lorsque son libellé est encadré par les caractères inférieur et supérieur, '<' et '>'.

Par défaut, un seul élément de la liste principale est sélectionné, c'est toujours celui qui est présenté sur l'afficheur braille.

Si vous actionnez la commande « Début de sélection », vous pouvez vous déplacer d'élément en élément sans entraîner la perte de la sélection. En tapant un espace vous pouvez ajouter ou retirer l'élément affiché de la sélection.

### **- Fin de sélection (Echap.)**

Cette commande permet de terminer la sélection. Dès que vous vous déplacerez dans la liste, la sélection sera annulée et seul l'élément de liste présenté sera sélectionné.

### **- Tout sélectionner (Ctrl+A)**

Cette commande permet de sélectionner l'ensemble des dossiers/fichiers de la liste, si au moins deux éléments sont sélectionnés, Esysfile entrera en sélection multiple.

### **- Inverser la sélection (Ctrl+I)**

Cette commande vous permet d'inverser la sélection dans la liste, si au moins deux éléments sont sélectionnés, Esyfile entrera en sélection multiple.

### **Menu Favoris**

Ce menu regroupe les emplacements les plus usuels :

- Documents (Ctrl+D) : Le dossier où sont placés habituellement les documents personnels, il s'agit également du dossier documents de Windows.
- Poste de travail (Ctrl+P) : La liste des unités disques disponibles.
- Clef USB : La liste des clefs USB disponibles.

### **Esynote**

Esynote est un outil de prise de note sous les différentes formes de braille (informatique, littéraire, abrégé mais aussi mathématique et musical).

### **Menu Fichier**

#### **- Nouveau (Ctrl+N)**

Crée un nouveau document vierge.

Le type de ce document et la police par défaut sont définies par le menu Paramètres>Esynote. Par défaut un fichier .mbe sera créé.

#### **- Ouvrir (Ctrl+O)**

Ouvre la boîte de dialogue qui permet la sélection d'un document.

Cette boîte de dialogue est assez proche des boîtes de dialogue "Ouvrir" standard aux applications Windows.

Avec Tab vous pourrez accéder aux différents objets de la boîte ouvrir:

- \* Le type de fichier
- \* Le bouton "Ouvrir"
- \* Le bouton "Annuler"
- \* Une boîte liste qui est présentée lors de l'ouverture de la boîte Ouvrir et qui contient les différents éléments du dossier, vous pouvez entrer dans un dossier avec la touche entrée et remonter au dossier père avec la touche correction.
- \* Une boîte éditable qui permet la saisie du nom de fichier.

A l'ouverture l'afficheur braille présente la boîte liste permettant de choisir le nom du fichier : Dans cette liste les dossiers sont préfixés de "d-", les fichiers de "f-" et les raccourcis de "r-". Les dossiers vides se terminent par le caractère '/'.

En appuyant une fois sur la touche tab, l'afficheur braille présentera une boîte éditable vous permettant de taper le nom du fichier et de le valider. Dès la frappe de la première lettre, la touche flèche en bas vous permet de parcourir la liste des

fichiers qui commencent par cette lettre et d'en choisir un. Les dossiers commençant par cette lettre sont aussi présentés.

Cette boîte d'édition permet aussi d'ouvrir des dossiers.

### ***- Acquérir du texte***

Ce sous menu regroupe les commandes de l'OCR (reconnaissance optique de caractère). Ces commandes fonctionnent à condition que le pilote compatible WIA pour votre scanner ait été installé sur votre Esytime. (Attention : Le protocole TWAIN n'est pas supporté, il est nécessaire que le protocole WIA soit supporté par votre scanner).

\* Numériser : Démarre la numérisation d'un document si un scanner est détecté.

\* Numériser et reconnaître : Démarre la numérisation du document et lance la reconnaissance de caractère. Le résultat de la reconnaissance de caractère est inséré dans le document en cours, à la position du curseur.

\* Numériser et reconnaître lot de pages : Permet de numériser plusieurs pages à la suite, afin de pouvoir lire des documents tels que des livres.

\* Reconnaître depuis un fichier : Ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner un fichier image (png, tiff, jpeg, bmp ou pdf). La reconnaissance de caractère est lancée sur le fichier choisi. Le résultat de la reconnaissance de caractère est inséré dans le document en cours à la position du curseur.

### ***- Enregistrer (Ctrl+S)***

Enregistre les modifications réalisées dans le document courant, si ce document est un nouveau document, cette fonction réalise un "enregistrer sous"

### ***- Enregistrer sous***

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant d'enregistrer le document courant en modifiant son nom, son type et son emplacement.

Cette boîte de dialogue ressemble beaucoup à celle du menu Ouvrir décrite précédemment. Notez que dans ce cas le premier élément n'est pas la boîte liste mais la boîte d'édition.

### ***- Fermer***

Ferme le document courant. En cas de modification du document, une boîte de dialogue vous demandera si vous voulez l'enregistrer ou non.

### ***- Fermer tout***

Ferme tous les documents d'Esynote. Pour chaque document modifié, une boîte de dialogue vous demandera si vous voulez l'enregistrer ou non.

### ***- Importer***

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant d'ouvrir des fichiers qu'Esysuite ne sait pas enregistrer ou dont l'enregistrement est accompagné de pertes d'information importantes.

Les types de fichiers gérés sont :

rtf : fichier 'Rich Text Format' utilisé souvent comme format permettant de faire le pont entre différents traitements de texte.

pdf : fichier Acrobat d'Adobe.

brl et brf : fichier de sortie du logiciel de transcription de Duxbury (non formaté ou formaté).

nat : fichier de sortie de NATbraille.

### ***- Exporter***

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant d'enregistrer des documents dans des formats spécifiques..

Ces formats sont associés aux types de fichier suivants :

mid : Fichier « midi » pour la sortie audio de partition musicale.

pdf : fichier Acrobat d'Adobe.

### ***- Embosser (Ctrl+B)***

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de choisir une embosseuse et de paramétrer le mode d'impression (recto ou recto-verso), les marges et le nombre de copies.

Les embosseuses gérées sont celles de la gamme Index version 3 4 et 5 ainsi que l'embosseuse emBraille de Viewplus.

### ***- Imprimer (Ctrl+P)***

Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de choisir l'imprimante, le papier, l'orientation du papier et l'étendue de l'impression (document complet, page courante et partie sélectionnée)

### ***- Aperçu avant impression***

Permet d'afficher à l'écran le document tel qu'il sera imprimé. Cette boîte de dialogue vous permet aussi d'imprimer le document comme avec la fonction précédente.

### ***- Fichiers récents***

Ce sous menu vous permet d'ouvrir les documents précédemment ouverts par Esynote. L'élément « Effacer tout » permet de vider la liste des fichiers récemment ouverts.

## **Menu Edition**

### ***- Annuler (Ctrl + Z)***

Permet de défaire les dernières modifications réalisées. Vous pouvez la déclencher plusieurs fois pour défaire successivement plusieurs opérations.

### ***- Rétablir (Ctrl + Y)***

Cette commande réalise la fonction inverse de la commande Annuler. Elle permet de rétablir des modifications précédemment annulées.

### ***- Début de sélection (F8)***

Cette commande permet d'entrer dans un mode où tous les déplacements curseur conduisent à une extension ou une réduction de la sélection. La sortie de ce mode est réalisée par le menu Edition\_fin de sélection, ou la fonction Echap.

### ***- Tout sélectionner (Ctrl + A)***

Cette commande permet de sélectionner l'ensemble du document.

### ***- Supprimer (Suppr.)***

Cette commande permet d'effacer du document le texte sélectionné.

### ***- Signet***

Ce sous menu vous permet de gérer les signets d'un document.

Un signet est une position dans le document qui est indiqué en braille par les 8 points levés et se présente graphiquement sous la forme d'une petite bille verte.

Le nombre de signets que l'on peut poser dans un document n'est pas limité.

Ce sous menu donne accès à 3 commandes:

\* Poser-retirer signets (Ctrl+F2)

\* Aller sur signet suivant (F2) : permet de déplacer le curseur sur le signet suivant en partant de la position courante du curseur dans le document. En fin de document la recherche de signet repart du début, elle ne s'arrête donc jamais.

\* Aller sur signet précédent (Maj + F2) : permet de déplacer le curseur sur le signet précédent en partant de la position courante du curseur dans le document. En début de document la recherche de signet repart de la fin, elle ne s'arrête donc jamais.

\* Effacer tous les signets (Ctrl+Maj+F2) : Cette commande retire tous les signets posés dans le document.

### ***- Rechercher (Ctrl+F)***

Cette commande ouvre une boîte de dialogue qui permet de rechercher un texte. Il est possible de définir dans quel type de braille la recherche aura lieu, la recherche

peut être lancée sur la suite ou sur ce qui précède le curseur en fonction du bouton que l'on choisit d'appuyer.

**- Rechercher suivant (F3)**

Cette commande sert à relancer la recherche dans le texte qui suit la position du curseur.

**- Rechercher précédent (Maj+F3)**

Cette commande sert à relancer la recherche dans le texte qui précède la position du curseur.

**- Remplacer (Ctrl+H)**

Cette boîte de dialogue est similaire à celle de la fonction Rechercher, à laquelle on a ajouté une boîte éditable permettant de définir le texte de remplacement.

**- Remplacer et trouver suivant (F4)**

Cette commande est utile après l'exécution de la commande Remplacer, elle permet de réaliser le remplacement du texte sélectionné et de réaliser la recherche de l'occurrence suivante. Si l'on veut passer à l'occurrence suivante sans réaliser le remplacement, il suffit de déclencher la fonction Rechercher suivant.

**- Remplacer et trouver le précédent (Maj+F4)**

Cette commande est symétrique à la précédente, elle permet de réaliser le remplacement du texte sélectionné et de réaliser la recherche de l'occurrence précédente.

**- Remplacer tout (F5)**

Cette commande permet de remplacer toutes les occurrences trouvées dans le document.

Note: les fonctions de recherche et de remplacement sont insensibles à la casse des caractères (majuscules et minuscules sont confondues). Les caractères accentués sont considérés comme des caractères à part entière (le 'e' et le 'é' par exemple ne sont pas confondus).

**- Couper (Ctrl + X)**

Cette commande permet de copier dans le presse-papier puis d'effacer le texte sélectionné.

### **- Copier (Ctrl+ C)**

Cette commande permet de copier dans le presse-papier puis d'effacer le texte sélectionné.

### **- Coller (Ctrl + V)**

Cette commande permet d'insérer le contenu du presse-papier dans le document. Si un texte est sélectionné, il est remplacé.

### **- Insérer fichier**

Cette commande permet l'insertion d'un fichier dans le document courant. Elle ouvre une boîte de dialogue qui est identique à celle de la commande Ouvrir.

### **- Afficher la barre d'état (Ctrl + Q)**

Cette commande permet d'afficher la barre d'état qui contient le type de braille courant, des informations sur la police de caractère utilisée, ainsi que la position du curseur dans le document.

## **Menu Format**

Ce menu regroupe tous les attributs de mise en forme supportés par Esysuite sur les paragraphes et leurs caractères.

Ce menu n'est disponible que dans le type de braille informatique.

Ces mises en forme sont affichées en braille sous forme de balises, par exemple <G> pour le gras.

Dans la boîte de dialogue paramètres braille, Balises texte, vous pourrez régler la visibilité de tous les attributs se rapportant aux caractères.

Le paramètre Balises paragraphe permet quant à lui de régler la visibilité de la balise indiquant l'alignement du paragraphe.

### **- Caractère**

Ce sous menu ouvre une liste d'attributs de caractères cochés ou non selon les caractéristiques des caractères sélectionnés.

### **- Police**

Ce sous menu donne accès à 3 commandes ouvrant des boîtes de dialogue :

\* Nom de la police : Cette boîte de dialogue vous présente dans une liste déroulante, la liste des polices de caractères disponibles.

\* Taille de la police : Cette boîte de dialogue vous propose dans une liste déroulante, une série de taille de caractère, il est néanmoins possible de saisir une taille entre 2 valeurs proposées.

\* Couleur de la police : Cette boîte de dialogue vous permet de modifier la couleur des caractères et la couleur du fond du texte sélectionné ou des prochains caractères saisis.

### **- Paragraphe**

Ce sous menu ouvre une liste d'alignement de paragraphe dont au plus un est coché en fonction des paragraphes sélectionnés.

Un paragraphe peut être aligné à droite, à gauche, centré ou justifié.

### **Menu Tableau**

Esysuite supporte les tableaux qu'il présente en braille grâce à des balises contenant les coordonnées de chaque cellule.

Les colonnes sont numérotées de a à z et les lignes sous forme de nombres. Ainsi la balise <A1> indique la première colonne de la première ligne du tableau.

Dans le menu paramètres\_braille\_balises texte, il est fortement conseillé de cocher "balises tableau" pour que ce type de balise soit visible.

La largeur des cellules du tableau est automatiquement dimensionnée au mot le plus long se trouvant dans chaque colonne.

Si une cellule contient plusieurs mots, ils sont de préférence mis sur plusieurs lignes dans la cellule et modifient la longueur de la cellule.

Ce principe de dimensionnement automatique des cellules est simple et correspond bien à la conception de tableau où l'on trouve plutôt un seul mot par cellule.

Il n'y a pas de raccourci clavier défini pour passer d'une cellule à l'autre, le plus simple est d'utiliser la fonction d'avance de l'afficheur braille pour parcourir les cellules d'une même ligne et les flèches haut, bas pour parcourir une colonne.

### **- Insérer un tableau**

Cette commande permet l'insertion d'un tableau à la position du curseur.

### **- Insérer ligne au-dessus**

Cette commande ajoute une nouvelle ligne au tableau au-dessus de la ligne dans laquelle se trouve le curseur.

### **- Insérer colonne à gauche**

Cette commande insère une nouvelle colonne à la gauche de celle dans laquelle se trouve le curseur.

### **- Fusionner les cellules**

Avec cette commande il est possible de fusionner plusieurs cellule, pour cela sélectionnez les avant de lancer cette commande.

### **- Fractionner les cellules**

Cette commande permet d'annuler la fusion de 2 cellules. Elle n'autorise pas le fractionnement d'une cellule.

## **Menu Type de braille**

Esysuite sait gérer les différents types de braille ci-dessous :

- Informatique (balise <B0>) (Alt + 0) : C'est le mode de fonctionnement le plus classique sur ordinateur, le codage braille des caractères est réalisé sur 8 points. Dans ce mode, une mise en forme du texte peut être mise en place et vérifiée en braille par l'intermédiaire de balises. En fin de cette documentation, vous trouverez la table de correspondance qui est utilisée.

- Littéraire (balise <B1>) (Alt + 1) : C'est le braille traditionnel 6 points des ouvrages papier. Les majuscules et les chiffres sont préfixés par une combinaison braille spécifique.

- Abrégé (balise <B2>) (Alt + 2) : Ce type de braille permet l'édition en braille abrégé, un chapitre de cette documentation est dédié à cette méthode de saisie.

Le texte ainsi saisi sera automatiquement désabrégué avant impression ou enregistrement au format odt, docx, html, txt ou pdf.

- Mathématique (balise <B3>) (Alt + 3) : Ce type de braille permet l'édition en braille mathématique, un chapitre de cette documentation est dédié à cette méthode de saisie.

- Musical (balise <B4>) (Alt + 4) : Ce type de braille permet l'édition en braille de partitions musicales, qui pourront être écoutées dans Esysuite, enregistrées au format midi pour pouvoir être écoutées sur un autre pc, ou encore enregistrées en format musicxml, pour être lues ou imprimées pour une personne voyante.

Dans la boîte de dialogue paramètre braille, la case à cocher "Balises type braille" vous permet de rendre visible ou de masquer l'affichage du type de braille.

### ***- Changer***

Cette commande permet de définir dans quel type de braille vous allez travailler. Si une partie du document a été préalablement sélectionnée, le braille contenu dans la sélection sera associé au nouveau type de braille choisi sans transformation.

### ***- Transcrire***

Cette commande permet de transcrire le document dans le type de braille choisi. Elle agira sur la zone du document sélectionnée.

Note : Certains types de braille ne peuvent pas être convertis, c'est le cas du braille musical ou mathématique. Une boîte de dialogue s'ouvrira dans ce cas pour vous demander si voulez malgré cela réaliser la conversion de type de braille en ignorant les sections non convertibles.

## **Menu Lecture**

Le menu lecture propose un ensemble de fonctions vocales sur le document ouvert par rapport à la position du curseur.

Il est ainsi possible de lire le caractère, le mot, la ligne et le paragraphe suivant ou précédent

## **Menu Mathématique**

Ce menu apparaît lorsque le curseur se trouve dans une zone de braille mathématique, il permet l'accès aux sous menus suivants :

### *- Insérer*

Ce sous menu donne accès à un grand nombre de commandes classées par thème. Elles permettent d'insérer à l'endroit du curseur la séquence braille correspondant au nom de la commande choisie.

### *- Calculer*

Ce sous menu permet de lancer le calcul de la ligne ou du bloc de lignes où se trouve le curseur.

Un bloc de lignes est constitué de toutes les lignes de type braille mathématique au-dessus et en dessous du curseur. C'est le changement de type de braille qui détermine le début et la fin d'un bloc.

Exemple de bloc mathématique :

$$\begin{aligned}a &= 11 \\a &= a + 1 \\a &= a + 2\end{aligned}$$

La saisie en braille mathématique doit respecter les règles établies par la commission pour l'évolution du braille français (sous-commission braille mathématique), à appliquer depuis septembre 2007.

### *- Voir MathML*

Cette commande permet de visualiser en langage MathML, l'interprétation d'une formule mathématique braille. Cela peut permettre de juger de la bonne compréhension de la formule par Esysuite.

### *- Voir StarMath*

Cette commande permet de visualiser en langage StarMath (utilisé par libreoffice), l'interprétation d'une formule mathématique braille. Cela peut permettre de juger de la bonne compréhension de la formule par Esysuite.

## **Menu Musique**

Ce menu apparaît lorsque le curseur se trouve dans une zone de braille musical, il permet l'accès aux sous menus suivants :

### *- Edition*

Ce sous menu donne accès à une boîte de dialogue spécialement conçue pour écrire et modifier les partitions musicales.

Une partition musicale est constituée d'une ou de plusieurs pistes qui représentent les divers instruments. Pour faciliter l'édition, la partition est décomposée en sections qui regroupent plusieurs mesures.

Chaque piste est affichée dans une zone éditable nommée qui indique la section et la piste. Par exemple S1P1 indique section 1 piste 1. La boîte de dialogue dispose d'un bouton « section suivante » et d'un bouton « section précédente » pour changer de section. Vous pouvez utiliser ces boutons pour changer de section ou bien simplement utiliser les flèches droite et gauche de déplacement du curseur. A la fin de la zone éditable S1P1, déplacer le curseur vers la droite revient au même qu'appuyer sur le bouton « section suivante » et la S2P1 est affichée dans la zone éditable. Le même principe est appliqué en début de zone éditable (déplacer le curseur vers la gauche revient au même qu'appuyer sur le bouton « section suivante »).

Le bouton « nouvelle section » permettra d'ajouter une section.

Le bouton « supprimer section » permettra de supprimer une section.

Le bouton « ok » valide les modifications réalisées et retourne dans le document.

Le bouton « annuler » abandonne les modifications réalisées et retourne dans le document.

Pour faciliter l'apprentissage du braille musical, un menu insertion est présent dans la boîte de dialogue « Edition ». Il donne accès à un grand nombre de commandes classées par thème. Elles permettent d'insérer à l'endroit du curseur la séquence braille correspondant au nom de la commande choisie.

#### ***- Lecture***

Joue la partition en MIDI.

#### ***- Stop***

Arrête la lecture MIDI en cours.

#### ***- Propriété des pistes***

Affiche une boîte de dialogue qui contient des informations sur les différentes pistes de la partition et permet d'y apporter des modifications.

## Esyschool

Il s'agit d'un cahier de texte scolaire permettant :  
de définir une liste de matière et de professeurs,  
de gérer ses devoirs à faire,  
de noter son emploi du temps,  
de mémoriser ses notes et de réaliser des moyennes.

La zone principale présente au choix : les devoirs, un emploi du temps, des matières-professeurs ou des professeurs-matières. Le menu Section permet de choisir laquelle de ces listes est affichée.

Un emploi du temps peut s'afficher par semaine ou par jour, il est possible de définir plusieurs emplois du temps.

Les fonctions décrites ci-dessous ont pour la plupart un rôle qui dépend de la section choisie.

### Menu Fichier

#### *- Nouveau (Ctrl+N) – section devoir*

Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer un nouveau devoir.

#### *- Nouveau (Ctrl+N) – section Matière-professeur ou professeur-matière*

Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer une nouvelle association.

#### *- Modifier (Entrée) – section devoir*

Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier le devoir sélectionné dans la liste.

#### *- Modifier – section Matière-professeur ou professeur-matière*

Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l'association.

#### *- Supprimer (Suppr.) – section devoir*

Efface le devoir de la liste.

#### *- Devoir réalisé – section devoir*

Uniquement visible lorsque la liste des devoirs est affichée, il présente l'état du devoir sélectionné (coché lorsque le devoir est réalisé). Cette commande bascule le devoir de l'état devoir à faire à devoir réalisé et inversement. C'est en fait un raccourci sur la case à cocher devoir réalisé de la boîte de dialogue de définition d'un devoir.

#### *- Gérer les matières*

Ouvre une boîte de dialogue présentant la liste des matières et 4 boutons

- Nouveau pour définir une nouvelle matière,
- Supprimer pour effacer de la liste la matière sélectionnée dans la liste,
- Modifier pour renommer une matière,
- Fermer pour sortir de cette boîte de dialogue.

#### *- Gérer les professeurs*

Ouvre une boîte de dialogue présentant la liste des professeurs et 4 boutons

- Nouveau pour définir une nouvelle matière,
- Supprimer pour effacer de la liste le professeur sélectionné dans la liste,
- Modifier pour renommer une matière,
- Fermer pour sortir de cette boîte de dialogue.

#### ***- Gérer les emplois du temps***

Ouvre une boîte de dialogue présentant la liste des emplois du temps et 4 boutons

- Nouveau pour définir un nouvel emploi du temps,
- Supprimer pour effacer l'emploi du temps sélectionné,
- Modifier pour renommer l'emploi du temps sélectionné,
- Fermer pour sortir de cette boîte de dialogue.

#### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme l'application Esyschool.

### **Menu Affichage – section devoirs**

Ce menu permet de paramétrer quel type de devoir on veut voir.

#### ***- Tout montrer***

Affiche tous les devoirs quelle que soit leur date de réalisation et qu'ils soient réalisés ou pas.

#### ***- Voir les devoirs à partir d'aujourd'hui***

Affiche la liste de tous les devoirs à partir d'aujourd'hui.

#### ***- Voir les devoirs pour aujourd'hui***

Affiche la liste de tous les devoirs du jour.

#### ***- Voir les devoirs pour demain***

Affiche la liste de tous les devoirs du lendemain.

#### ***- Voir les devoirs des 7 jours à venir***

Affiche la liste de tous les devoirs des 7 jours à venir.

#### ***- Filtrage***

Affiche un sous menu permettant de filtrer la liste des devoirs de façon plus précise :

- Par Date (à partir d'une date ou à partir d'une date et jusqu'à une autre date),
- Par matière,
- Par description (Tout devoir contenant la bride de texte définie sera affiché),
- En masquant les devoirs réalisés,
- Désactiver tous les filtrages permet de revenir à un affichage complet de la liste des devoirs.

## **Menu Affichage – section emploi du temps**

### ***- Journée (Entrée) – affichage semaine***

Affiche la journée sélectionnée sous forme détaillée, on passe alors d'un affichage semaine à un affichage journée.

### ***- Semaine (Correction) – affichage journée***

Retour à un affichage de la semaine.

### ***- Emploi du temps suivant (droite) – affichage semaine***

Affiche l'emploi du temps suivant, cette fonction n'a un effet que si plusieurs emplois du temps ont été créés.

### ***- Emploi du temps précédent (gauche) – affichage semaine***

Affiche l'emploi du temps précédent, cette fonction n'a un effet que si plusieurs emplois du temps ont été créés.

### ***- Jour suivant (droite) – affichage journée***

Affiche le jour suivant.

### ***- Jour précédent (gauche) – affichage journée***

Affiche le jour précédent.

## **Menu Section**

### ***- Devoir***

Affiche la liste des devoirs.

### ***- Emploi du temps***

Affiche un emploi du temps.

### ***- Matière-professeur***

Affiche la liste des matières suivies des professeurs associés.

### ***- Professeur-Matière***

Affiche la liste des professeurs et des matières associées.

### ***- Carnet de notes***

Affiche le carnet de notes

## Esydico

Esydico est une application d'une utilisation très simple. Elle possède un champ d'édition nommé "Recherche" dans lequel vous pouvez taper les premiers caractères du mot dont vous souhaitez la définition. Avec la touche Tab vous pouvez alors passer dans la seconde zone qui contient la définition du mot le plus proche de celui tapé dans le champ recherche.

Cette zone de définition est multi-ligne, vous pouvez la lire en déplaçant l'afficheur braille comme dans un éditeur.

Une fois quelques caractères tapés dans le champ recherche, il est possible avec les touches flèche en bas et en haut de passer de définition en définition. Le champ recherche est alors actualisé en même temps que la définition.

### Menu Fichier

#### *- Dictionnaire*

Permet de sélectionner le dictionnaire que vous désirez utiliser.

#### *- Fermer (Ctrl+F4)*

Ferme l'application dictionnaire.

### Menu Lecture

Ce menu permet de lancer la synthèse vocale à partir de la position courante dans la zone de définition.

#### *- Position de lecture*

Calcule puis énonce le numéro de ligne et de colonne courante dans la zone de texte sur le nombre de lignes total.

#### *- Tout le document depuis la position de lecture (J1 gauche + J2 bas)*

#### *- Paragraphe suivant (J1 gauche + J2 haut)*

#### *- Paragraphe suivant (J1 gauche + J2 droite)*

#### *- Paragraphe précédent (J1 gauche + J2 gauche)*

## Esydaisy

Esydaisy est un lecteur de document au format Daisy (audio et texte combiné). Il supporte les documents au format Daisy 2 et Daisy 3.

Ce lecteur est constitué d'une arborescence contenant un sommaire du document et d'une zone de texte qui contient l'ensemble du document sous sa forme textuelle lorsque celle-ci est disponible.

Avec la commande Tab vous pouvez passer du sommaire de l'ouvrage à son document texte.

Lorsque vous lancez la lecture des fichiers audio associés au document, le segment de texte correspondant est surligné à l'écran et la position dans le texte est placée au début de cette zone. Si pendant la lecture une rubrique de sommaire est dépassée, le pointeur dans le sommaire passe à la rubrique suivante.

Il en est de même lorsque vous vous déplacez dans le sommaire, la position dans le texte est mise à jour pour pointer le texte correspondant au début du sommaire.

## **Menu Fichier**

### ***- Ouvrir (Ctrl+O)***

Permet de sélectionner un fichier ncc.html ou ncc.htm situé dans un dossier contenant l'ensemble des fichiers du document daisy.

### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme l'application Esysdaisy.

### ***- Propriétés***

Affiche une boîte de dialogue contenant les principales caractéristiques de l'ouvrage ouvert (Titre, auteur, date, durée d'écoute, nombre de niveaux du sommaire).

### ***- Derniers fichiers ouverts***

A la fin du menu fichier sont affichés les 5 derniers fichiers qui ont été ouverts.

## **Menu Edition**

### ***- Réduire sommaire***

Cette commande réduira entièrement l'arbre du sommaire. Cela vous permet de développer vous-même uniquement les éléments qui vous intéressent.

### ***- Développer sommaire***

La totalité des éléments constituant l'arbre du sommaire sera visible de manière à pouvoir visualiser l'ensemble de la structure de l'ouvrage.

### ***- Rechercher dans le sommaire (Ctrl+M)***

Ouvre une boîte de dialogue qui permet de rechercher dans le sommaire un segment de texte. Une liste déroulante permet de choisir le sens de la recherche et une case à cocher vous permet de définir la sensibilité à la casse des caractères (respecter les majuscules minuscules ou non).

### ***- Rechercher dans le texte (Ctrl+D)***

Ouvre une boîte de dialogue qui permet de rechercher dans le document un texte. Comme pour la recherche dans le sommaire, une liste déroulante permet de choisir le sens de la recherche et une case à cocher vous permet de définir la sensibilité à la casse des caractères (respecter les majuscules minuscules ou non).

### *- Rechercher suivant (F3)*

Recherche la prochaine occurrence du texte dans le document courant.

### *- Rechercher précédent (Maj+F3)*

Recherche l'occurrence précédente du texte dans le document courant.

## **Menu Lecteur**

Le menu lecteur vous permet de lancer les fichiers audio associés à l'élément du sommaire sélectionné.

### *- Jouer/ mettre en pause (Ctrl+P)*

Lance ou met en pause la lecture du document à partir de l'élément de sommaire sélectionné.

### *- Arrêter (Ctrl+S)*

Arrête la lecture.

### *- Suivant (Ctrl+F)*

Passes à la lecture du texte correspondant à l'élément suivant du sommaire.

### *- Précédent (Ctrl+G)*

Passes à la lecture du texte correspondant à l'élément précédent du sommaire.

## **Menu Lecture**

Le menu Lecture permet de lancer la synthèse vocale à partir de la position courante dans la zone de texte.

### *- Position de lecture*

Calcule puis énonce le numéro de ligne et de colonne courante dans la zone de texte sur le nombre de lignes total.

### *- Tout le document depuis la position de lecture (J1 gauche + J2 bas)*

### *- Paragraphe suivant (J1 gauche + J2 droite)*

### *- Paragraphe précédent (J1 gauche + J2 gauche)*

## **Esyplay**

Esyplay est un lecteur multimédia basé sur une bibliothèque multimédia.

Cette bibliothèque permet un accès rapide à l'ensemble des fichiers multimédias de l'Esytime en choisissant quels dossiers Esyplay doit analyser. Les différents fichiers sont triés en fonction de leur type : musique, vidéo, radio ou liste de lecture.

De plus, les musiques peuvent être triées selon 4 critères: par album, par artiste, par genre ou par dossier.

Esyplay se présente sous la forme de 3 volets :

- La bibliothèque représentée comme un arbre.

- La liste des éléments contenus dans l'élément sélectionné de la bibliothèque.
- La liste de lecture construite à partir des différents éléments sélectionnés.

Les vidéos sont toujours triées par dossier.

Les radios sont triés par ordre alphabétique, il est possible de modifier cette liste.

Les listes de lecture sont affichées directement dans l'arbre de la bibliothèque.

## **Menu Fichier**

### ***- Ouvrir***

Permet de sélectionner un fichier à ouvrir dans une nouvelle liste de lecture.

### ***- Enregistrer la liste de lecture***

Permet de sauvegarder la liste de lecture au format m3u. Enregistrer une liste de lecture dans un des dossiers de la bibliothèque multimédia permettra de la voir affichée dans la liste des listes de lecture. (Voir Configurer la bibliothèque)

### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme l'application lecteur multimédia.

### ***- Configurer la bibliothèque***

Permet de définir les dossiers à partir desquels Esyplay va constituer sa bibliothèque multimédia. L'ajout d'un dossier à cette liste ajoute également tous les sous-dossiers de celui-ci.

### ***- Rafraîchir la bibliothèque***

Permet de lancer une analyse des différents dossiers de la Bibliothèque afin de la mettre à jour. Cette fonction est proposée par Esyplay après avoir modifié la liste des dossiers de la bibliothèque ou après avoir changé des propriétés d'un fichier audio (titre, album, artiste).

### ***- Gérer les radios***

Ouvre une boîte de dialogue présentant la liste des radios et 5 boutons permettant de retirer, créer ou modifier la radio sélectionnée dans la liste, de valider ou d'abandonner les modifications réalisées.

## **Menu Lecteur**

### ***- Jouer / Mettre en pause (Ctrl + P)***

Met en pause ou relance la lecture du fichier courant.

### ***- Arrêter (Ctrl + S)***

Stoppe la lecture du fichier courant.

### ***- Suivant (Ctrl + F)***

Lance la lecture du fichier suivant dans la liste de lecture courante.

**- Précédent (Ctrl + B)**

Lance la lecture du fichier précédent dans la liste de lecture courante.

**- Recul 3%**

Permet de revenir en arrière dans le fichier en cours de lecture.

**- Recul 10%**

Permet de revenir plus nettement en arrière dans le fichier en cours de lecture.

**- Avance 3%**

Permet d'avancer dans le fichier en cours de lecture.

**- Avance 10%**

Permet d'avancer plus nettement dans le fichier en cours de lecture.

**- Augmenter le volume**

Permet d'augmenter le volume du fichier en cours de lecture.

**- Baisser le volume**

Permet de diminuer le volume du fichier en cours de lecture.

**- Lire en boucle (Ctrl + L)**

Permet de continuer la lecture une fois que tous les fichiers d'une liste de lecture ont été lus.

**- Lire aléatoirement (Ctrl + H)**

Permet de lire la liste de lecture courante aléatoirement.

## **Menu Liste de lecture**

**- Ajouter à la liste de lecture**

Permet de sélectionner plusieurs fichiers à ajouter à la liste de lecture courante.

**- Supprimer de la liste de lecture**

Permet de supprimer l'élément sélectionné de la liste de lecture.

**- Déplacer un élément vers le haut**

Permet de modifier l'ordre de la liste de lecture en déplaçant l'élément sélectionné vers le haut.

**- Déplacer un élément vers le bas**

Permet de modifier l'ordre de la liste de lecture en déplaçant l'élément sélectionné vers le bas.

## **Esyweb**

Esyweb est un navigateur internet.

Le navigateur web est constitué d'une barre d'adresse et d'une zone de rendu de la page web (appelée par la suite simplement page web).

Le raccourci Alt+d affiche le contenu de la barre d'adresse qui vous permet d'entrer l'adresse du site web que vous voulez consulter. Si le texte que vous écrivez dans la barre d'adresse ne correspond pas à une adresse web valide, une recherche google sera lancée automatiquement avec ce texte. Pour valider le texte tapé dans la barre d'adresse, vous devez utiliser la touche Entrée. Pour retourner dans la page web depuis la barre d'adresse, appuyez sur la touche Tab.

### **Présentation Braille dans la page web**

Le contenu de la page web est présenté sur l'afficheur Braille avec des balises pour repérer les liens, les images, la mise en forme (gras, italique), les éléments de formulaire (zone d'édition, bouton, case à cocher, liste déroulante). Les balises peuvent être affichées sous forme de balise longue, courte ou réduite.

Balise lien : <lien> ou <ln> ou \_

Balise image : <image> ou <img> ou \_

Balise gras : <gras> ou <g> ou \_

Balise italique : <italique> ou <i> ou \_

Balise zone d'édition : <texte> ou <te> ou \_

Balise bouton : <bouton> ou <btn> ou \_

Balise case à cocher : <case à cocher> ou <cac> ou \_

Balise liste déroulante : <liste déroulante> ou <ld> ou \_

Le passage d'un mode d'affichage à l'autre se fait en cliquant sur le caractère '>' de la balise. Le changement du mode d'affichage est : longue, réduite, courte, réduite, longue, réduite, etc. L'affichage par défaut (balise longue ou courte) se fait par la boîte de dialogue « Paramètres>Braille ».

### **Menu Fichier**

#### ***- Adresse (Alt+D)***

Cette commande donne accès à la barre d'adresse du navigateur. Vous pouvez alors modifier l'URL pour aller sur une autre page.

#### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme le navigateur.

### **Menu Déplacement sur**

Ce menu regroupe les déplacements

#### ***- Précédent (Correction)***

Recharge la page web précédente.

#### ***- Suivant (Espace)***

Recharge la page web suivante (dans le cas où la page web précédente avait été rechargée).

## **- Balises (B)**

Ce sous menu regroupe les déplacements sur les balises html présentes dans la page web.

- \* Lien suivant (N) : Déplace l'afficheur Braille sur le lien suivant.
- \* Lien précédent (Maj+N) : Déplace l'afficheur Braille sur le lien précédent.
- \* Titre suivant (T) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre suivant. Les déplacements par Titre permettent en général d'accéder rapidement au contenu d'une page web.
- \* Titre précédent (Maj+T) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre précédent.
- \* Titre de niveau 1 suivant (1) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 1 suivant.
- \* Titre de niveau 1 précédent (Ctrl+Maj+1) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 1 précédent.
- \* Titre de niveau 2 suivant (2) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 2 suivant.
- \* Titre de niveau 2 précédent (Ctrl+Maj+2) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 2 précédent.
- \* Titre de niveau 3 suivant (3) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 3 suivant.
- \* Titre de niveau 3 précédent (Ctrl+Maj+3) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 3 précédent.
- \* Titre de niveau 4 suivant (4) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 4 suivant.
- \* Titre de niveau 4 précédent (Ctrl+Maj+4) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 4 précédent.
- \* Titre de niveau 5 suivant (5) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 5 suivant.
- \* Titre de niveau 5 précédent (Ctrl+Maj+5) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 5 précédent.
- \* Titre de niveau 6 suivant (6) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 6 suivant.
- \* Titre de niveau 6 précédent (Ctrl+Maj+6) : Déplace l'afficheur Braille sur le titre de niveau 6 précédent.
- \* Zone d'édition suivante (E' – précédente (Maj+E) : Déplace l'afficheur Braille sur la zone d'édition suivante - précédente. Pour entrer en mode édition, vous devez cliquer sur la routine curseur située juste après le signe '='.
- \* Zone de liste déroulante suivante (Z) - précédente (Maj+Z) : Déplace l'afficheur Braille sur la zone de liste déroulante suivante - précédente.
- \* Bouton suivant (U) - précédent (Maj+U) : Déplace l'afficheur Braille sur le bouton suivant - précédent.
- \* Case à cocher suivante (X) - précédente (Maj+X) : Déplace l'afficheur Braille sur la case à cocher suivante - précédente.
- \* Bouton radio suivant (R) - précédente (Maj+R) : Déplace l'afficheur Braille sur le bouton radio suivant - précédent.

**- Début de ligne Braille suivante (P ou Bas)**

Déplace l'afficheur Braille sur le début de la ligne Braille suivante.

**- Début de ligne Braille précédente (MAJ+P ou Haut)**

Déplace l'afficheur Braille sur le début de la ligne Braille précédente.

**- Début de page (Ctrl+Début)**

Déplace l'afficheur Braille sur le début de la page web.

**- Fin de page (Ctrl+Fin)**

Déplace l'afficheur Braille sur la fin de la page web.

**- Début de ligne Braille (Début)**

Déplace l'afficheur Braille sur le début de la ligne Braille courante.

**- Fin de ligne Braille (Fin)**

Déplace l'afficheur Braille sur la fin de la ligne Braille courante.

**- Rechercher... (Ctrl+F)**

Ouvre la boîte de Recherche. La boîte de dialogue Rechercher contient une zone de texte pour définir le texte à rechercher et une case à cocher pour définir la sensibilité à la casse (respecter les majuscules minuscules ou non). Les boutons « Recherche suivant » et « Recherche précédent » démarrent la recherche dans un sens ou dans l'autre. Le bouton « Annuler » referme la boîte de dialogue sans lancer la recherche.

**- Rechercher le suivant (F3)**

Déplace l'afficheur Braille sur le texte suivant (le texte à rechercher et la casse sont définis dans la boîte de recherche).

**- Rechercher le précédent (Maj+F3)**

Déplace l'afficheur Braille sur le texte précédent (le texte à rechercher et la casse sont définis dans la boîte de recherche).

**Menu Affichage**

**- Résumé de la page web**

Affiche une boîte de dialogue donnant des informations sur le nombre d'objets et leur type. Il suffit de valider une de ces statistiques pour entrer dans la boîte de dialogue les énumérant.

Ces différentes boîtes de dialogue sont aussi accessibles par les éléments de menu ci-dessous :

- *Liste des liens*
- *Liste des titres*
- *Liste des titres de niveau 1...6*
- *Liste des zones d'édition*
- *Liste des boutons*
- *Liste des cases à cocher*
- *Liste des boutons radio*
- *Liste des zones de liste déroulantes*

## **Menu Lecture**

### *- Toute la page*

Lecture complète de la page web par la synthèse vocale.

### *- Ligne braille courante*

Lit le bloc de texte affiché en braille.

### *- Ligne braille suivante*

Lit le bloc de texte suivant.

### *- Ligne braille précédente*

Lit le bloc de texte précédent.

## **Menu Favoris**

Un favori est mémorisé sous la forme d'un nom de page et d'une adresse web (URL) associée.

Les favoris peuvent être organisés dans des dossiers. Les dossiers sont visibles dans le menu Favoris comme des sous menus qui contiennent des favoris. Chaque dossier (ou sous menu) peut lui-même contenir d'autres dossiers (ou sous menus). Le menu favoris et tous les sous menu (qui représentent les dossiers) commencent par 2 éléments de menu pour ajouter la page courante aux favoris et créer un nouveau dossier.

### *- Ajouter la page courante aux favoris...*

Ouvre la boîte de dialogue « Nouvelle page » qui contient 2 zones éditables pour définir le nom de la page et l'adresse de la page. Les 2 zones éditables sont remplies avec les informations qui correspondent à la page web courante. Le favori créé est ajouté dans les sous menu courant.

***- Nouveau dossier...***

Ouvre la boîte de dialogue « Nouveau dossier» qui contient une zone éditable pour définir le nom du nouveau dossier. Une fois le nouveau dossier créé, un sous menu qui porte le nom du dossier est ajouté. Il est alors possible d'ajouter la page courante dans ce dossier.

***- Gérer les favoris...***

Ouvre la boîte de dialogue « Gestion des favoris » qui contient un arbre (qui affiche les dossiers et les favoris) une case à cocher « Masquer l'adresse » et 10 boutons pour gérer l'organisation des favoris.

## Esycontact

Esycontact est l'application qui gère vos contacts.

Chaque contact est constitué des champs suivants :

- Prénom
- Nom
- Email principal
- Email personnel
- Email professionnel
- Skype personnel
- Skype professionnel
- Date de naissance
- Téléphone
- Téléphone portable
- Téléphone domicile
- Téléphone professionnel
- Fax
- Site web
- Adresse domicile
- Code postal domicile
- Ville domicile
- Pays domicile
- Adresse travail
- Code postal travail
- Ville travail
- Pays travail

Esycontact affiche la liste de vos contacts dans la fenêtre principale. Un filtre vous permet de retrouver facilement vos contacts dans la liste. Pour passer de la liste des contacts au filtre vous devez utiliser la touche Tabulation. Dans la zone de texte « filtre », vous tapez les caractères recherchés. Si vous tapez comme filtre le texte « ba » tous les contacts qui contiennent le texte « ba » seront affichés dans la liste des contacts. Pour revenir à la liste complète, il suffit d'effacer le texte du filtre.

### Menu Fichier

#### *- Nouveau contact... (Ctrl+N)*

Ouvre la boîte de dialogue qui permet de définir tous les champs d'une fiche contact.

#### *- Supprimer contact... (Suppr)*

Supprimer le (ou les) contact(s) sélectionné(s). Une boîte de dialogue demande la confirmation avant de réaliser la suppression définitive.

**- Modifier contact... (Entrée)**

Ouvre la boîte de dialogue qui permet de modifier tous les champs de la fiche contact focusée.

**- Importer... (Ctrl+I)**

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'importer les contacts depuis l'application Contact de Google.

**- Exporter... (Ctrl+E)**

Ouvre la boîte de dialogue qui permet d'exporter les contacts vers l'application Contact de Google.

**- Fermer (Ctrl+F4)**

Ferme l'application Esyscontact.

## **Esycalc**

Esycalc est une calculatrice basique, permettant d'effectuer rapidement des calculs simples. Dans le cadre d'une utilisation scolaire et d'autant plus quand on utilisera des calculs scientifiques, il faudra utiliser la calculatrice scientifique intégrée à Esynote.

Esycalc est une calculatrice se présentant comme une ligne de texte éditable accompagnée d'un ensemble de boutons correspondant à toutes les entrées ou fonctions permises. Ces boutons sont présents essentiellement pour l'affichage à l'écran et sa manipulation à la souris. La méthode la plus simple pour la commander étant l'utilisation du clavier braille.

La calculatrice supporte aussi les opérateurs braille mathématique suivant :

opérateur - Combinaison braille

addition - 235

soustraction - 36

multiplication - 35

division - 34

égal - 2356

racine carré - 345

## **Menu Fichier**

**- Nouveau (Ctrl+N)**

Ouvre une nouvelle application calculatrice.

**- Fermer (Ctrl+F4)**

Ferme l'application calculatrice.

## Menu Calculer

### - *Opérateur*

Ce sous menu regroupe les opérateurs de la calculatrice à l'exception des 5 opérateurs de base (+, -, \*, / et =).

### - *Mémoire*

Ce sous menu regroupe toutes les fonctions mettant en jeu la mémoire de la calculatrice qui permet le stockage d'une valeur.

### - *Conversion*

- Euro en devise vous permet de convertir la valeur courante de la calculatrice en Euro dans la devise choisie.

- Devise en Euro vous permet de convertir la valeur courante de la calculatrice de la devise en Euro.

- Paramètre de conversion ouvre une boîte de dialogue vous permettant le définir de nom de la devise et le taux de change de celle-ci

### - *Calculateur financier*

Ce sous menu affiche un enchaînement de boîtes de dialogue dans lesquelles il sera possible de se déplacer à l'aide des boutons suivant et précédant. Elles vous permettront de calculer le montant des mensualités, le coût d'un prêt et le nombre de ses mensualités.

## Esysudoku

EsySudoku est un jeu de Sudoku. Le joueur doit remplir la grille 9x9 proposée de façon à ce que chaque ligne, chaque colonne et chaque groupe de 9 cases soit rempli de tous les chiffres de 1 à 9.

Les chiffres qui ne peuvent pas être modifiés sont affichés sous forme de lettre de a à i avec a=1, b=2 jusqu'à i=9. Les chiffres ajoutés par le joueur sont donc affichés normalement.

Les chiffres à découvrir sont remplacés par le caractère 'x'.

Pour remplir une grille de sudoku, il suffit de remplacer un 'x' en déplaçant le curseur dessus de taper le chiffre que l'on désire placer. Si l'on change d'avis, il suffit de remplacer ce chiffre par un caractère 'x' de la même façon.

Lorsque la grille est terminée, la fonction entrée (braille 9A) permet de la valider, Esysudoku vous indique alors si vous avez perdu ou gagné.

Voici un exemple de grille correctement remplie :

dga | 3fi | b8e

beh | 1dg | if3

3fi | beh | 17d

-----

8b5 | g14 | fci

93f | hbe | gda  
adg | 9c6 | 852

-----  
e8b | 47a | 3if  
fi3 | e8b | dag  
g1d | fi3 | e2h

## **Menu Fichier**

### ***- Nouvelle partie (Ctrl+N)***

Lance une nouvelle partie.

### ***- Fermer (Ctrl+F4)***

Ferme l'application Esysudoku.

## **Menu Mode**

### ***- Ligne (Alt+1)***

L'afficheur braille présente une ligne, il commence par « L » suivi du numéro de la ligne, les lignes sont numérotées de haut en bas.

### ***- Colonne (Alt+2)***

L'afficheur braille présente une colonne, il commence par « C » suivi du numéro de la colonne, les colonnes sont numérotées de gauche à droite.

### ***- Groupe (Alt+3)***

L'afficheur braille présente un groupe, il commence par « G » suivi du numéro du groupe, les groupes sont ordonnés de gauche à droite et de haut en bas.

## Esybomb

Esybomb est une application qui calque le jeu du démineur.

Il faut découvrir sur une grille des bombes placées aléatoirement à des emplacements de la grille. Lorsqu'une case est découverte, toutes les cases à proximité sont découvertes aussi et un chiffre est présent dans celles qui sont à proximité d'une bombe. Ce chiffre est représentatif du nombre de bombes adjacentes à cette case.

Par déduction, il devient possible de découvrir d'autres cases sans risque et de marquer les cases où se situent à coup sûr une bombe.

La grille s'affiche par ligne, sur l'afficheur braille, chaque ligne commence par la lettre « L » suivie de son numéro d'ordre. Les lignes sont numérotées de haut en bas.

Les cases non découvertes sont marquées d'un tiret '- '.

Pour découvrir une case, il suffit de placer le curseur dessus et de taper un espace (braille A).

Pour marquer un emplacement qui se trouve être une bombe, placer le curseur dessus et taper un 'b' ou la fonction correction (braille 9).

Si vous n'explorer pas avant, Esybomb vous indiquera lorsque toute la grille aura été découverte' que vous avez gagné.

### Menu Fichier

#### *- Nouvelle partie (Ctrl+N)*

Lance une nouvelle partie.

#### *- Fermer (Ctrl+F4)*

Ferme l'application Esybomb.

### Menu Niveau

#### *- Débutant*

Lorsque vous lancerez une nouvelle partie 5 bombes seront placées dans la grille.

#### *- Confirmé*

Lorsque vous lancerez une nouvelle partie 10 bombes seront placées dans la grille.

#### *- Expert*

Lorsque vous lancerez une nouvelle partie 15 bombes seront placées dans la grille.

## **Raccourcis claviers**

### **Raccourcis globaux**

Ctrl+F4 = ferme la fenêtre en cours

F1 = Documentation au format Esynote

Alt+Haut = Augmente le volume de la synthèse vocale

Alt+Bas = Diminue le volume de la synthèse vocale

Alt+Droite = Augmente le volume du lecteur Esyplay

Alt+Gauche = Diminue le volume du lecteur Esyplay

### **Raccourcis du menu application**

Ctrl+Maj+F = Se déplace dans Esyfile

Ctrl+Maj+N = Se déplace dans Esynote

Ctrl+Maj+S = Se déplace dans Esyschool

Ctrl+Maj+D = Se déplace dans Esydico

Ctrl+Maj+Y = Se déplace dans Esydaisy

Ctrl+Maj+P = Se déplace dans Esyplay

Ctrl+Maj+W = Se déplace dans Esyweb

Ctrl+Maj+T = Se déplace dans Esycontact

Ctrl+Maj+C = Se déplace dans Esycalc

Ctrl+Maj+K = Se déplace dans Esysudoku

Ctrl+Maj+B = Se déplace dans Esybomb

Ctrl+Maj+V = Met en veille l'appareil

Ctrl+Maj+F4 = Eteint l'appareil

### **Raccourcis du menu fenêtre**

Ctrl+1 à Ctrl+9 = Activation du document de 1 à 9

### **Raccourcis d'Esyfile**

Suppr. = Supprime un fichier ou dossier

F2 = Renomme un fichier ou dossier

Ctrl+F = Ouvre la boîte de dialogue de recherche de fichier

Alt+Entrée = Affiche les propriétés d'un fichier ou dossier

Ctrl+D = Ouvre le dossier documents

Ctrl+P = ouvre le dossier poste de travail

Ctrl+X = Coupe la sélection dans le presse-papier

Ctrl+C = Copie la sélection dans le presse-papier

Ctrl+V = Colle le contenu du presse-papier

F8 = Début de sélection

Echap. = Fin de sélection

Ctrl+A = Sélectionner tout

Ctrl+I = Inverser la sélection

Ctrl+H = aller au chemin spécifié

## **Raccourcis d'Esynote**

### *Boîtes de dialogue*

Ctrl+N = Crée un nouveau document Esynote

Ctrl+O = Affiche la boîte de dialogue Ouvrir

Ctrl+S = Sauvegarde le document ou Affiche la boîte de dialogue Enregistrer sous

Ctrl+P = Affiche la boîte de dialogue Imprimer

### *Edition*

Ctrl+Z = Annule la dernière modification

Ctrl+Y ou Ctrl+Maj+Z = Refait la dernière modification défaite

Suppr. = Effacement de la sélection ou du caractère

CTRL+Q = Affichage de la barre d'état

### *Recherche/Remplace*

Ctrl+F = Affiche la boîte de dialogue Rechercher

F3 = Se déplace sur la prochaine chaîne de caractère recherchée

Ctrl+H = Affiche la boîte de dialogue Remplacer

F4 = Réalise le remplacement de la chaîne de caractère recherchée

F5 = Réalise tous les remplacements de la chaîne de caractère recherchée

### *Presse-papier*

Ctrl+A = Sélection de tout le document

Ctrl+X = Coupe la sélection dans le presse-papier

Ctrl+C = Copie la sélection dans le presse-papier

Ctrl+V = Colle le contenu du presse-papier

### *Signet*

F2 = Aller au signet suivant

Maj+F2 = Aller au signet précédent

Ctrl+F2 = Poser-Retirer un signet

Ctrl+Maj+F2 = Effacer tous les signets

### *Attributs*

Ctrl+G = Commutation du Gras

Ctrl+I = Commutation de l'italique

Ctrl+U = Commutation souligné

Ctrl+L = Aligne le paragraphe à gauche

Ctrl+R = Aligne le paragraphe à droite

Ctrl+E = Centre le paragraphe

Ctrl+J = Justifie le paragraphe

### ***Mathématique***

Ctrl+M = Calcule la formule sur la ligne courante

Ctrl+T = Calcule les formules en enchaînant les calculs pour les lignes situées avant et après la ligne du curseur

### ***Type de braille***

Alt+0 = Passage en Braille Informatique

Alt+1 = Passage en Braille Littéraire

Alt+2 = Passage en Braille Abrégé

Alt+3 = Passage en Braille Mathématique

Alt+4 = Passage en Braille Musical

Alt+Page suivante = curseur sur le type Braille Suivant

Alt+Page précédente = curseur sur le type Braille Précédent

### ***Gestion des balises***

Ctrl+Alt+T = Balises sous forme courte ou longue

Ctrl+Alt+G = Balises gras affichées ou masquées

Ctrl+Alt+I = Balises italique affichées ou masquées

Ctrl+Alt+S = Balises souligné affichées ou masquées

Ctrl+Alt+R = Balises barré affichées ou masquées

Ctrl+Alt+A = Balises cellule de tableau affichées ou masquées

Ctrl+Alt+H = Balises alignement de paragraphe affichées ou masquées

Ctrl+Alt+C = Balises puces "petit cercle"

Ctrl+Alt+D = Balises puces "petit disque"

Ctrl+Alt+B = Balises puces "petit cube"

Ctrl+Alt+L = Toutes les balises de puces affichées ou masquées

## Caractères Braille informatique 8 points

La table braille utilisée par Esysuite correspond à la table braille informatique définie en 2007 par la commission Evolution du Braille Français pour le jeu de caractères CP-1252.

Code ANSI - Combinaison braille - Description du caractère

- 0 - 123458 - Nul
- 1 - 1234678 - début d'en - tête
- 2 - 1258 - début de texte
- 3 - 123468 - fin de texte
- 4 - 14578 - fin de transmission
- 5 - 158 - Demande
- 6 - 12478 - Confirmation
- 7 - 12458 - Sonnerie
- 8 - 12578 - retour arrière
- 9 - 124678 - tabulation horizontale
- 10 - 24568 - Interligne
- 11 - 138 - tabulation verticale
- 12 - 12378 - avancement de page
- 13 - 13478 - retour chariot
- 14 - 13458 - Maj out
- 15 - 2368 - Maj in
- 16 - 123478 - data link escape
- 17 - 1234578 - commande de périphérique (1
- 18 - 123578 - commande de périphérique (2
- 19 - 23478 - commande de périphérique (3
- 20 - 234578 - commande de périphérique (4
- 21 - 13678 - confirmation négative
- 22 - 123678 - Synchronisation
- 23 - 245678 - fin de transmission de bloc
- 24 - 134678 - Annulation
- 25 - 12368 - fin de support
- 26 - 15678 - Substitution
- 27 - 125678 - Échappement
- 28 - 14678 - séparateur de fichier
- 29 - 12678 - séparateur de groupe
- 30 - 2357 - séparateur d'enregistrement
- 31 - 2367 - séparateur d'unité
- 32 - - Espace
- 33 - 235 - point d'exclamation
- 34 - 2356 - Guillemets
- 35 - 34568 - Dièse
- 36 - 357 - Dollar
- 37 - 3468 - pour cent

38 - 1234568 - et commercial  
39 - 3 - Apostrophe  
40 - 236 - parenthèse gauche  
41 - 356 - parenthèse droite  
42 - 35 - Astérisque  
43 - 23578 - Plus  
44 - 2 - virgule  
45 - 36 - Tiret  
46 - 256 - Point  
47 - 34 - barre oblique, slash  
48 - 3456 - Zéro  
49 - 16 - Un  
50 - 126 - Deux  
51 - 146 - Trois  
52 - 1456 - Quatre  
53 - 156 - Cinq  
54 - 1246 - Six  
55 - 12456 - Sept  
56 - 1256 - Huit  
57 - 246 - Neuf  
58 - 25 - deux - points  
59 - 23 - point - virgule  
60 - 238 - Inférieur  
61 - 235678 - Égal  
62 - 567 - Supérieur  
63 - 26 - point d'interrogation  
64 - 345 - a commercial, at, "arrobas"  
65 - 17 - a majuscule  
66 - 127 - b majuscule  
67 - 147 - c majuscule  
68 - 1457 - d majuscule  
69 - 157 - e majuscule  
70 - 1247 - f majuscule  
71 - 12457 - g majuscule  
72 - 1257 - h majuscule  
73 - 247 - i majuscule  
74 - 2457 - j majuscule  
75 - 137 - k majuscule  
76 - 1237 - l majuscule  
77 - 1347 - m majuscule  
78 - 13457 - n majuscule  
79 - 1357 - o majuscule  
80 - 12347 - p majuscule  
81 - 123457 - q majuscule

82 - 12357 - r majuscule  
83 - 2347 - s majuscule  
84 - 23457 - t majuscule  
85 - 1367 - u majuscule  
86 - 12367 - v majuscule  
87 - 24567 - w majuscule  
88 - 13467 - x majuscule  
89 - 134567 - y majuscule  
90 - 13567 - z majuscule  
91 - 23678 - crochet gauche  
92 - 348 - barre oblique inversée  
93 - 35678 - crochet droit  
94 - 4 - accent circonflexe  
95 - 578 - souligné  
96 - 6 - accent grave  
97 - 1 - a minuscule  
98 - 12 - b minuscule  
99 - 14 - c minuscule  
100 - 145 - d minuscule  
101 - 15 - e minuscule  
102 - 124 - f minuscule  
103 - 1245 - g minuscule  
104 - 125 - h minuscule  
105 - 24 - i minuscule  
106 - 245 - j minuscule  
107 - 13 - k minuscule  
108 - 123 - l minuscule  
109 - 134 - m minuscule  
110 - 1345 - n minuscule  
111 - 135 - o minuscule  
112 - 1234 - p minuscule  
113 - 12345 - q minuscule  
114 - 1235 - r minuscule  
115 - 234 - s minuscule  
116 - 2345 - t minuscule  
117 - 136 - u minuscule  
118 - 1236 - v minuscule  
119 - 2456 - w minuscule  
120 - 1346 - x minuscule  
121 - 13456 - y minuscule  
122 - 1356 - z minuscule  
123 - 2378 - accolade gauche  
124 - 4568 - barre verticale  
125 - 5678 - accolade droite

126 - 38 - tilde  
127 - 1238 - caractère d'annulation  
128 - 1578 - euro  
129 - 12345678 - non utilisé  
130 - 67 - guillemet - virgule inférieur  
131 - 1248 - f hameçon minuscule  
132 - 56 - guillemet-virgule double inférieur  
133 - 368 - points de suspension  
134 - 3568 - obèle  
135 - 3567 - double obèle  
136 - 48 - lettre modificative accent circonflexe  
137 - 34678 - pour mille  
138 - 234678 - s caron majuscule  
139 - 57 - guillemet simple vers la gauche  
140 - 2467 - oe majuscule  
141 - 12345678 - non utilisé  
142 - 135678 - z caron majuscule  
143 - 12345678 - non utilisé  
144 - 12345678 - non utilisé  
145 - 68 - guillemet - apostrophe culbuté  
146 - 37 - guillemet - apostrophe  
147 - 378 - guillemet - apostrophe double culbuté  
148 - 678 - guillemet - apostrophe double  
149 - 124578 - puce  
150 - 478 - tiret demi - cadratin  
151 - 4578 - tiret cadratin  
152 - 467 - petit tilde avec chasse  
153 - 23458 - marque de commerce  
154 - 23468 - s caron minuscule  
155 - 58 - guillemet simple vers la droite  
156 - 2468 - oe minuscule  
157 - 12345678 - non utilisé  
158 - 13568 - z caron minuscule  
159 - 145678 - y tréma majuscule  
160 - 7 - espace insécable  
161 - 2358 - point d'exclamation inversé  
162 - 1478 - centime  
163 - 237 - livre  
164 - 45 - symbole monétaire  
165 - 25678 - yen  
166 - 458 - barre verticale interrompue  
167 - 12348 - paragraphe <alinéa>  
168 - 46 - tréma avec chasse  
169 - 148 - copyright

170 - 1678 - indicateur ordinal féminin  
171 - 23568 - guillemet gauche  
172 - 2567 - négation  
173 - 78 - trait d'union conditionnel  
174 - 12358 - marque déposée  
175 - 1348 - macron avec chasse  
176 - 267 - degré  
177 - 3678 - plus ou moins  
178 - 457 - exposant deux  
179 - 4567 - exposant trois  
180 - 5 - accent aigu avec chasse  
181 - 257 - micro  
182 - 45678 - pied de mouche <fin de paragraphe>  
183 - 8 - point médian  
184 - 456 - cedille avec chasse  
185 - 47 - exposant un  
186 - 2678 - indicateur ordinal masculin  
187 - 23567 - guillemet droit  
188 - 1368 - un quart  
189 - 468 - un demi  
190 - 13468 - trois quarts  
191 - 268 - point d'interrogation inversé  
192 - 123567 - a accent grave majuscule  
193 - 1235678 - a accent aigu majuscule  
194 - 167 - a accent circonflexe majuscule  
195 - 178 - a tilde majuscule  
196 - 34567 - a tréma majuscule  
197 - 27 - a rond en chef majuscule  
198 - 3457 - ae majuscule  
199 - 123467 - c cédille majuscule  
200 - 23467 - e accent grave majuscule  
201 - 1234567 - e accent aigu majuscule  
202 - 1267 - e accent circonflexe majuscule  
203 - 12467 - e tréma majuscule  
204 - 2478 - i accent grave majuscule  
205 - 347 - i accent aigu majuscule  
206 - 1467 - i accent circonflexe majuscule  
207 - 124567 - i tréma majuscule  
208 - 1278 - eth majuscule  
209 - 134578 - n tilde majuscule  
210 - 13578 - o accent grave majuscule  
211 - 3467 - o accent aigu majuscule  
212 - 14567 - o accent circonflexe majuscule  
213 - 1378 - o tilde majuscule

214 - 24678 - o tréma majuscule  
215 - 3578 - multiplication  
216 - 345678 - o majuscule barré obliquement  
217 - 234567 - u accent grave majuscule  
218 - 2345678 - u accent aigu majuscule  
219 - 1567 - u accent circonflexe majuscule  
220 - 12567 - u tréma majuscule  
221 - 1345678 - y accent aigu majuscule  
222 - 24578 - thorn majuscule  
223 - 2348 - s dur minuscule, szet allemand  
224 - 12356 - a accent grave minuscule  
225 - 123568 - a accent aigu minuscule  
226 - 168 - a accent circonflexe minuscule  
227 - 18 - a tilde minuscule  
228 - 34578 - a tréma minuscule  
229 - 28 - a rond en chef minuscule  
230 - 3458 - ae minuscule  
231 - 12346 - c cédille minuscule  
232 - 2346 - e accent grave minuscule  
233 - 123456 - e accent aigu minuscule  
234 - 1268 - e accent circonflexe minuscule  
235 - 12468 - e tréma minuscule  
236 - 248 - i grave minuscule  
237 - 3478 - i aigu minuscule  
238 - 1468 - i circonflexe minuscule  
239 - 124568 - i tréma minuscule  
240 - 128 - eth minuscule  
241 - 1245678 - n tilde minuscule  
242 - 1358 - o grave minuscule  
243 - 346 - o aigu minuscule  
244 - 14568 - o circonflexe minuscule  
245 - 4678 - o tilde minuscule  
246 - 358 - o tréma minuscule  
247 - 2578 - division  
248 - 568 - o minuscule barré obliquement  
249 - 23456 - u grave minuscule  
250 - 234568 - u aigu minuscule  
251 - 1568 - u circonflexe minuscule  
252 - 12568 - u tréma minuscule  
253 - 134568 - y accent aigu minuscule  
254 - 2458 - thorn minuscule  
255 - 2568 - y tréma minuscule

## Fonctions Braille 10 points

Ces combinaisons servent à générer toutes les touches d'un clavier PC, autres que les caractères. Elles sont également parfois appelées bramigraphs. Graph fait penser au fait que les points braille utilisés pour générer une action, ont souvent une logique graphique qui permet de simplifier leur apprentissage.

Exemples :

- La fonction début qui a pour effet d'aller en début de ligne dans une zone d'édition, ou de se positionner en début de liste, se fait en utilisant la combinaison 123A, (points 1 2 3 en même temps que l'espace). Sa fonction symétrique, fin, qui a pour effet d'aller en fin de ligne dans une zone d'édition, ou de se positionner en fin de liste, se fera en utilisant les points braille symétriques, en conservant l'espace donc 456A (points 4 5 6 en même temps que l'espace).
- Les 4 flèches peuvent également se générer avec des fonctions braille 10 points, bien que l'on puisse les utiliser avec le joystick 2, il peut être plus commode de les générer ainsi lors d'une suite de raccourcis. On remarquera que les 4 flèches utilisent toujours la touche A (espace), combinée avec l'un des 4 points de la lettre w en braille (2456), la flèche haut utilisera le point du haut du w on tapera donc 4A, la flèche bas utilisera le point du bas du w, on tapera donc 6A, la flèche gauche utilisera le point de gauche du w, on tapera donc 2A, enfin la flèche droite se tapera 5A.
- Les fonctions de F1 à F12, se généreront en utilisant les 12 premières lettres de l'alphabet en combinaison avec l'espace de gauche, exemple 19 pour F1 jusque 1239 pour F12.

Liste détaillée :

### Edition

9 - Correction

A - Espace

9A - Entrée

35A – Insertion (Utilisé comme commutateur => 2 appuis pour simuler un appui-relâche)

36A - Effacement

### Navigation

123A - Début

456A - Fin

2A - Gauche

5A - Droite

4A - Haut

6A - Bas

13A - Page précédente

46A - Page suivante

### Pavé numérique

169 - 1  
1269 - 2  
1469 - 3  
14569 - 4  
159 - 5  
12469 - 6  
124569 - 7  
12569 - 8  
2469 - 9  
34569 - 0  
29 - ,  
349 - /  
359 - \*  
369 - -  
2359 - +  
3459 - Entrée

### Autres

1245A - Echappement  
256A - Tabulation  
235A - Maj+Tabulation  
1346A - Impression écran  
14A – Pause / Break  
569 - Menu contextuel  
Fonctions  
19 - F1  
129 - F2  
149 - F3  
1459 - F4  
159 - F5  
1249 - F6  
12459 - F7  
1259 - F8  
249 - F9  
2459 - F10  
139 - F11  
1239 - F12

### Commutateurs

12349 - Menu démarrer Windows  
79 - Majuscule verrouillée.  
89 - Majuscule déverrouillée  
39 - Verrouillage du pavé numérique  
69 - Déverrouillage du pavé numérique  
7A - Maj  
78A - Ctrl  
178A - Ctrl appuyé (en dehors d'Esysuite seulement)  
478A - Ctrl relâché (en dehors d'Esysuite seulement)  
8A - Alt  
18A - Alt appuyé (en dehors d'Esysuite seulement)

48A - Alt relâché (en dehors d'Esysuite seulement)

## **Le clavier braille uni-manuel**

4 modes de fonctionnement du clavier braille permettent la frappe de caractères à l'aide d'une seule main, voire d'un seul doigt.

### **Mode unimanuel 1 :**

Cela consiste à taper les points braille en plusieurs appuis successifs ou combinés sur les touches, puis à valider la somme de ces appuis avec la touche braille A.

Si la touche A fait partie de la combinaison braille, il faudra la taper en combinaison avec un autre point, puis la ré-appuyer seule pour valider la combinaison.

### **Mode unimanuel 2 :**

C'est un mode de fonctionnement un peu plus rapide en ce sens que la validation du code se fait automatiquement.

Le clavier braille se trouve divisé en 2 parties, d'un côté les points 1,2,3,7,9 et de l'autre les points 4,5,6,8,A. Il suffit de taper la première partie de la combinaison braille en une ou plusieurs frappes, puis de taper en une seule frappe la seconde partie, la combinaison braille est alors générée.

Pour les combinaisons braille ne possédant des points que dans une seule partie, il suffit d'appuyer sur la touche braille A pour les valider.

### **Mode unimanuel 3 :**

Ce mode de fonctionnement permet la saisie de combinaison braille en utilisant que la moitié gauche du clavier (points 1,2,3,7). Après saisie de la première moitié de la combinaison braille, la seconde moitié est saisie selon la correspondance suivante : 1-4, 2-5, 3-6, 7-8, 9-A.

Les touches 9 et A tapées avec une des 2 moitiés, sont prises en compte comme telles.

La touche 9 ou A est utilisée pour générer Correction ou Espace mais aussi pour valider les combinaisons braille qui ne possèdent pas de seconde moitié.

La touche 4 frappée seule permet de saisir des combinaisons braille qui ne possèdent pas de première moitié.

### **Mode unimanuel 4 :**

Ce mode de fonctionnement est le même que le précédent mais en utilisant les points 4,5,6,8,A. Pour taper la première moitié de la combinaison, on utilisera la correspondance suivante 4-1, 5-2, 6-3. C'est la touche braille 1 qui permettra de saisir des combinaisons braille sans première moitié.

## **Rappel aux règles du braille littéraire**

### **Les 63 symboles**

BRILLE - ANSII - SIGNIFICATION

1 - 97 - a

12 - 98 - b

14 - 99 - c  
145 - 100 - d  
15 - 101 - e  
124 - 102 - f  
1245 - 103 - g  
125 - 104 - h  
24 - 105 - i  
245 - 106 - j  
13 - 107 - k  
123 - 108 - l  
134 - 109 - m  
1345 - 110 - n  
135 - 111 - o  
1234 - 112 - p  
12345 - 113 - q  
1235 - 114 - r  
234 - 115 - s  
2345 - 116 - t  
136 - 117 - u  
1236 - 118 - v  
1346 - 120 - x  
13456 - 121 - y  
1356 - 122 - z  
12346 - 135 - ç  
123456 - 130 - e accent aigu  
12356 - 133 - a accent grave  
2346 - 138 - e accent grave  
23456 - 151 - u accent grave  
16 - 131 - a accent circonflexe  
126 - 136 - e accent circonflexe  
146 - 140 - i accent circonflexe  
1456 - 147 - o accent circonflexe  
156 - 150 - u accent circonflexe  
1246 - 137 - e accent tréma  
12456 - 139 - i accent tréma  
1256 - 129 - u accent tréma  
246 - 14 - e dans o  
2456 - 119 - w  
2 - 44 - virgule  
23 - 59 - point-virgule  
25 - 58 - 2 points  
256 - 46 - point  
26 - 63 - Point d'interrogation, Indicateur de début de mise en évidence de 2ème  
type à l'intérieur d'un mot

235 - 33 - point d'exclamation  
2356 - 34 - Guillemet ouvrant ou fermant  
236 - 40 - Parenthèse ouverte  
35 - 42 - - Indicateur de fin de mise en évidence de 2ème type à l'intérieur d'un mot  
356 - 41 - Parenthèse fermé  
3 - 39 - Apostrophe, Point de conduite, Espace entre les chiffres  
34 - 47 - slash  
345 - 64 - Arrobas  
3456 - 216 - Ensemble vide  
346 - 243 - Indicateur d'appel de note  
36 - 45 - Trait d'union, Trait de conduite  
4 - 94 - Indicateur d'exposant ou d'élévation  
45 - 164 - Modificateur 1  
456 - 184 - Indicateur général de mise en évidence  
46 - 168 - Indicateur de majuscule  
5 - 180 - Modificateur 2, Indicateur de continuation dans les expressions  
mathématiques, informatiques ou scientifiques  
56 - 132 - Indicateur de valeur de base, Indicateur général de fin de mise en  
évidence à l'intérieur d'un mot  
6 - 96 - Modificateur mathématique

### **Les chiffres et les signes arithmétiques**

BRAILLE - REPRESENTATION - SIGNIFICATION

3456 - 0 - Zéro  
16 - 1 - Un  
126 - 2 - Deux  
146 - 3 - Trois  
1456 - 4 - Quatre  
156 - 5 - Cinq  
1246 - 6 - Six  
12456 - 7 - Sept  
1256 - 8 - Huit  
246 - 9 - Neuf  
235 - + - Plus  
36 - - - Moins  
35 - x - Multiplié par  
25 - ÷ - Divisé par  
2356 - = - Egal

### **Les symboles composés**

BRAILLE - SIGNIFICATION

246, 135 - Puce  
256, 256, 256 - Points de suspension  
36, 36 - Tiret

5, 14 - Copyright  
 5, 135 - Degré  
 5, 1234 - Symbole de paragraphe, de section  
 5, 1235 - Marque déposée  
 5, 2345 - Marque de commerce  
 5, 123456 - Et commercial, perluette  
 5, 26 - Tilde  
 5, 35 - Astérisque  
 5, 3456 - Dièse  
 5, 346 - Pour cent  
 5, 346, 346 - Pour mille  
 5, 36 - Trait de soulignement  
 5, 34 - Barre oblique inverse  
 45, 14 - Cent  
 45, 15 - Euro  
 45, 123 - Livre  
 45, 234 - Dollar  
 45, 13456 - Yen  
 45, 2356 - Guillemet ouvrant de niveau 2  
 2356, 12 - Guillemet fermant de niveau 2  
 6, 6, 2356 - Guillemet ouvrant de niveau 3  
 2356, 3, 3 - Guillemet fermant de niveau 3  
 45, 236 - Crochet ouvrant  
 356, 12 - Crochet fermant  
 6, 6, 236 - Accolade ouvrant  
 356, 3, 3 - Accolade fermant  
 5, 126 - Inférieur à  
 5, 345 - Supérieur à  
 45, 126 - Inférieur ou égal à  
 45, 345 - Supérieur ou égal à  
 235,36 - Plus ou moins  
 46,2356 - Inégal à  
 45, 1234 - pi

## Correspondance des mathématiques avec LibreOffice

Signification – Braille – Classification libre office – mot clef libre office

parenthèse gauche -  $\cdot$  - encadrements - (  
 parenthèse droite -  $\cdot$  - encadrements - )  
 crochet gauche -  $\cdot$  - encadrements - [ ou lbracket  
 crochet droit -  $\cdot$  - encadrements - ] ou rbracket  
 bloc gauche -  $\cdot$  - encadrements - {

bloc droite - : - encadrements - }  
 label gauche - · : - encadrements - "  
 label droite - · : - encadrements - "  
 accolade gauche - :· - encadrements - lbrace  
 accolade droite - :· - encadrements - rbrace  
 grande parenthèse gauche - ·· - encadrements -  
 grande parenthèse droite - ·· - encadrements -  
 grand crochet gauche - ·· - encadrements -  
 grand crochet droit - ·· - encadrements -  
 grande accolade gauche - · :· - encadrements -  
 grande accolade droite - · :· - encadrements -  
 plus - ·· - opérateurs - +  
 moins - ·· - opérateurs - -  
 multiplication - ·· - opérateurs - times  
 division - ·· - opérateurs - div ou /  
 fraction - ·· - opérateurs - over  
 modulo - ··· - opérateurs - func mod  
 indice - ·· - opérateurs - \_  
 exposant - · - opérateurs - ^  
 indice souscrit - ·· - opérateurs - csub  
 indice suscrit - ·· - opérateurs - csup  
 indice souscrit antérieur - ·· - opérateurs - lsub  
 indice suscrit antérieur - ·· - opérateurs - lsup  
 valeur absolue - :::: - fonctions - lline rline  
 racine carrée - ·· - fonctions - sqrt  
 racine nme - ···· - fonctions - nroot{n}{x}  
 logarithme népérien - :: - fonctions - ln()  
 logarythme base 10 - :: - fonctions - log()  
 limite - ::···· - fonctions - lim csub {}  
 exponentielle - ·· - fonctions - e^{  
 partie entière - ···· - fonctions - func int  
 partie réelle - ···· - fonctions - Re  
 partie imaginaire - ···· - fonctions - Im  
 factorielle - :: - fonctions - fact{}  
 pourcent - ·· - fonctions - func "%"  
 pourmille - ···· - fonctions - func ‰  
 sinus - ···· - trigonométrie - sin()  
 cosinus - ···· - trigonométrie - cos()

tangente -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - tan()  
 cotangente -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - cot()  
 arc sinus -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arcsin()  
 arc cosinus -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arccos()  
 arc tangente -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arctan()  
 arc cotangente -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arccot()  
 sinus hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - sinh()  
 cosinus hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - cosh()  
 tangente hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - tanh()  
 cotangente hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - coth()  
 arg sinus hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arsinh()  
 arg cosinus hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arcosh()  
 arg tangente hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - artanh()  
 arg cotangente hyperbolique -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - arcoth()  
 radian -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - func rad  
 degré -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - trigonométrie - func deg  
 égal à -  $\cdot \cdot$  - comparaison - =  
 différent de -  $\cdot \cdot$  - comparaison - <>  
 peu différent de -  $\cdot \cdot$  - comparaison - approx ou simeq ou sim  
 supérieur à -  $\cdot \cdot$  - comparaison - > ou succ  
 supérieur ou égal à -  $\cdot \cdot$  - comparaison - >= ou geslant ou succcurlyeq ou succsim  
 inférieur à -  $\cdot \cdot$  - comparaison - < ou prec  
 inférieur ou égal à -  $\cdot \cdot$  - comparaison - <= ou leslant  
 plus grand que ou moins grand que -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - comparaison -  
 très supérieur à -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - comparaison - >>  
 très inférieur à -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - comparaison - <<  
 congru à -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - comparaison - equiv  
 non congru à -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - comparaison - func !equiv  
 somme -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func sum  
 maximum -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func max  
 minimum -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func min  
 nombre -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func nb  
 moyenne -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func average  
 médiane -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func median  
 quartile 1 -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func quartile1  
 quartile 2 -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func quartile2  
 quartile 3 -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func quartile3  
 variance -  $\cdot \cdot \cdot \cdot$  - statistique - func variance

écart type -  $\sigma$  - statistique - func deviation  
 nombre de combinaisons -  $\binom{n}{k}$  - statistique - func combination  
 nombre d'arrangements -  $P(n, k)$  - statistique - func arrangement  
 répétition -  $n^k$  - statistique - rightarrow  
 séparateur -  $;$  - statistique - ;  
 parallèle à -  $\parallel$  - géométrie - parallel  
 perpendiculaire à -  $\perp$  - géométrie - ortho  
 vecteur -  $\vec{v}$  - géométrie - widevec  
 produit scalaire -  $\cdot$  - géométrie - cdot  
 produit vectoriel -  $\wedge$  - géométrie - and  
 produit tensoriel -  $\otimes$  - géométrie -  
 produit de convolution -  $\ast$  - géométrie - \*  
 somme directe -  $\oplus$  - géométrie -  
 angle -  $\widehat{\cdot}$  - géométrie - widehat  
 valeur algébrique -  $\overline{\cdot}$  - géométrie - barou overline  
 arc -  $\overset{\frown}{\cdot}$  - géométrie - breve  
 norme -  $\|\cdot\|$  - géométrie - ldline rdline  
 ensemble vide -  $\emptyset$  - ensemble/ensemble usuel - emptyset  
 ensemble naturel -  $\mathbb{N}$  - ensemble/ensemble usuel - setN  
 ensemble naturel strict -  $\mathbb{N}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setN^"\*"  
 ensemble entier -  $\mathbb{Z}$  - ensemble/ensemble usuel - setZ  
 ensemble entier strict -  $\mathbb{Z}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setZ^"\*"  
 ensemble entier positif -  $\mathbb{N}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setZ^"+"  
 ensemble entier positif strict -  $\mathbb{N}^{*+}$  - ensemble/ensemble usuel - setZ^"+"\*"  
 ensemble entier négatif -  $\mathbb{Z}^-$  - ensemble/ensemble usuel - setZ^"-"  
 ensemble entier négatif strict -  $\mathbb{Z}^{-*}$  - ensemble/ensemble usuel - setZ^"-"\*"  
 ensemble décimal -  $\mathbb{D}$  - ensemble/ensemble usuel - setD  
 ensemble décimal strict -  $\mathbb{D}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setD^"\*"  
 ensemble décimal positif -  $\mathbb{D}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setD^"+"  
 ensemble décimal positif strict -  $\mathbb{D}^{*+}$  - ensemble/ensemble usuel - setD^"+"\*"  
 ensemble décimal négatif -  $\mathbb{D}^-$  - ensemble/ensemble usuel - setD^"-"  
 ensemble décimal négatif strict -  $\mathbb{D}^{-*}$  - ensemble/ensemble usuel - setD^"-"\*"  
 ensemble rationnel -  $\mathbb{Q}$  - ensemble/ensemble usuel - setQ  
 ensemble rationnel strict -  $\mathbb{Q}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setQ^"\*"  
 ensemble rationnel positif -  $\mathbb{Q}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setQ^"+"

ensemble rationnel positif strict -  $\mathbb{Q}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setQ^+

ensemble rationnel négatif -  $\mathbb{Q}^-$  - ensemble/ensemble usuel - setQ^-

ensemble rationnel négatif strict -  $\mathbb{Q}^{<0}$  - ensemble/ensemble usuel - setQ^<0

ensemble réel -  $\mathbb{R}$  - ensemble/ensemble usuel - setR

ensemble réel strict -  $\mathbb{R}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setR^\*

ensemble réel positif -  $\mathbb{R}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setR^+

ensemble réel positif strict -  $\mathbb{R}^{>0}$  - ensemble/ensemble usuel - setR^{>0}

ensemble réel négatif -  $\mathbb{R}^-$  - ensemble/ensemble usuel - setR^-

ensemble réel négatif strict -  $\mathbb{R}^{<0}$  - ensemble/ensemble usuel - setR^{<0}

ensemble complexe -  $\mathbb{C}$  - ensemble/ensemble usuel - setC

ensemble complexe strict -  $\mathbb{C}^*$  - ensemble/ensemble usuel - setC^\*

ensemble complexe positif -  $\mathbb{C}^+$  - ensemble/ensemble usuel - setC^+

ensemble complexe positif strict -  $\mathbb{C}^{>0}$  - ensemble/ensemble usuel - setC^{>0}

ensemble complexe négatif -  $\mathbb{C}^-$  - ensemble/ensemble usuel - setC^-

ensemble complexe négatif strict -  $\mathbb{C}^{<0}$  - ensemble/ensemble usuel - setC^{<0}

élément de -  $\in$  - ensemble/opérateur sur ensemble - in

non élément de -  $\notin$  - ensemble/opérateur sur ensemble -notin

possède -  $\owns$  - ensemble/opérateur sur ensemble - owns

sous-ensemble de (inclusion stricte) -  $\subset$  - ensemble/opérateur sur ensemble - subset

non inclus dans (sens strict) -  $\not\subset$  - ensemble/opérateur sur ensemble - nsubset

sous-ensemble de ou égal à (inclusion sens large) -  $\subseteq$  - ensemble/opérateur sur ensemble - subseteq

non inclus dans (sens large) -  $\not\subseteq$  - ensemble/opérateur sur ensemble - nsubseteq

contient -  $\supset$  - ensemble/opérateur sur ensemble - supset

ne contient pas -  $\not\supset$  - ensemble/opérateur sur ensemble - nsupset

contient ou égal à -  $\supseteq$  - ensemble/opérateur sur ensemble - supseteq

ne contient pas et différent de -  $\not\supseteq$  - ensemble/opérateur sur ensemble - nsupseteq

union -  $\cup$  - ensemble/opérateur sur ensemble - union

intersection -  $\cap$  - ensemble/opérateur sur ensemble - intersection

quotient d'ensembles -  $\oslash$  - ensemble/opérateur sur ensemble -

complément d'un ensemble -  $\complement$  - ensemble/opérateur sur ensemble -

grande union -  $\bigcup$  - ensemble/opérateur sur ensemble - union

grande intersection -  $\bigcap$  - ensemble/opérateur sur ensemble - intersection

infini - ∞ - symbole -  
 a pour image - ∙ ∙ - symbole - toward  
 flèche à droite - ∴ - symbole -  
 flèche montant à droite - ∴ - symbole -  
 flèche descendant à droite - ∴ - symbole -  
 fonction de composition - ∴ ∴ - symbole - circ  
 plus ou moins - ∙ ∙ ∙ - symbole - "±"  
 moins ou plus - ∙ ∙ ∙ - symbole -  
 point de suspension - ∙ ∙ ∙ - symbole - "..."  
 virgule - ∙ - symbole - ,  
 point virgule - ∙ - symbole - ;  
 il existe - ∴ ∴ - autre symbole/symbolelogique - exists  
 il n'existe pas - ∴ ∴ - autre symbole/symbolelogique - notexists  
 quel que soit - ∴ ∴ - autre symbole/symbolelogique - forall  
 tel que - ∙ ∙ - autre symbole/symbolelogique - ∴  
 implique - ∙ ∙ - autre symbole/symbolelogique - drarrow  
 est impliqué par - ∙ ∙ - autre symbole/symbolelogique - dlarrow  
 équivalent - ∙ ∙ ∙ - autre symbole/symbolelogique - dlarrow  
 et logique - ∴ ∙ - autre symbole/symbolelogique - and  
 ou logique - ∴ ∙ - autre symbole/symbolelogique -  
 ion positif - ∙ ∴ - autre symbole/ion - ^"+"  
 ion négatif - ∙ ∙ - autre symbole/ion - ^"-"  
 ion plus plus - ∙ ∴ ∴ ∴ - autre symbole/ion - ^{2}"+"  
 ion moins moins - ∙ ∴ ∙ ∙ ∴ - autre symbole/ion - ^{2} "-"  
 ion plus plus plus - ∙ ∴ ∴ ∴ ∴ - autre symbole/ion - ^{3}"+"  
 ion moins moins moins - ∙ ∴ ∴ ∙ ∙ ∴ - autre symbole/ion - ^{3} "-"  
 prime - ∙ - autre symbole/dérivée - '  
 seconde - ∙ ∙ - autre symbole/dérivée -  
 tierce - ∙ ∙ ∙ - autre symbole/dérivée -  
 dérivée partielle - ∙ ∴ - autre symbole/dérivée - partial  
 nabla - ∴ ∴ - autre symbole/dérivée - nabla  
 d'alembertien - ∴ ∴ - autre symbole/dérivée -  
 degré - ∙ ∴ - autre symbole/température - "°"  
 celsius - ∙ ∴ ∴ - autre symbole/température -  
 fahrenheit - ∙ ∴ ∴ - autre symbole/température -  
 kelvin - ∴ ∴ - autre symbole/température - "K"  
 alpha majuscule - ∴ ∴ - lettre/grecque/majuscule - "A"  
 beta majuscule - ∴ ∴ - lettre/grecque/majuscule - "B"

gamma majuscule -  $\Gamma$  - lettre/grecque/majuscule - "Γ"  
delta majuscule -  $\Delta$  - lettre/grecque/majuscule - "Δ"  
epsilon majuscule -  $\text{Ε}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ε"  
zeta majuscule -  $\text{Ζ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ζ"  
eta majuscule -  $\text{Η}$  - lettre/grecque/majuscule - "Η"  
theta majuscule -  $\Theta$  - lettre/grecque/majuscule - "Θ"  
iota majuscule -  $\text{Ι}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ι"  
kappa majuscule -  $\text{Κ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Κ"  
lambda majuscule -  $\Lambda$  - lettre/grecque/majuscule - "Λ"  
mu majuscule -  $\text{Μ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Μ"  
nu majuscule -  $\text{Ν}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ν"  
xi majuscule -  $\Xi$  - lettre/grecque/majuscule - "Ξ"  
omicron majuscule -  $\text{Ο}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ο"  
pi majuscule -  $\Pi$  - lettre/grecque/majuscule - "Π"  
rho majuscule -  $\text{Ρ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Ρ"  
sigma majuscule -  $\Sigma$  - lettre/grecque/majuscule - "Σ"  
tau majuscule -  $\text{Τ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Τ"  
upsilon majuscule -  $\text{Υ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Υ"  
phi majuscule -  $\Phi$  - lettre/grecque/majuscule - "Φ"  
chi majuscule -  $\text{Χ}$  - lettre/grecque/majuscule - "Χ"  
psi majuscule -  $\Psi$  - lettre/grecque/majuscule - "Ψ"  
omega majuscule -  $\Omega$  - lettre/grecque/majuscule - "Ω"  
alpha minuscule -  $\alpha$  - lettre/grecque/minuscule - "α"  
beta minuscule -  $\beta$  - lettre/grecque/minuscule - "β"  
gamma minuscule -  $\gamma$  - lettre/grecque/minuscule - "γ"  
delta minuscule -  $\delta$  - lettre/grecque/minuscule - "δ"  
epsilon minuscule -  $\epsilon$  - lettre/grecque/minuscule - "ε"  
zeta minuscule -  $\zeta$  - lettre/grecque/minuscule - "ζ"  
eta minuscule -  $\eta$  - lettre/grecque/minuscule - "η"  
theta minuscule -  $\theta$  - lettre/grecque/minuscule - "θ"  
iota minuscule -  $\iota$  - lettre/grecque/minuscule - "ι"  
kappa minuscule -  $\kappa$  - lettre/grecque/minuscule - "κ"  
lambda minuscule -  $\lambda$  - lettre/grecque/minuscule - "λ"  
mu minuscule -  $\mu$  - lettre/grecque/minuscule - "μ"  
nu minuscule -  $\nu$  - lettre/grecque/minuscule - "ν"  
xi minuscule -  $\xi$  - lettre/grecque/minuscule - "ξ"  
omicron minuscule -  $\omicron$  - lettre/grecque/minuscule - "ο"  
pi minuscule -  $\pi$  - lettre/grecque/minuscule - "π"

rho minuscule - ρ - lettre/grecque/minuscule - "ρ"  
 sigma minuscule - σ - lettre/grecque/minuscule - "σ"  
 tau minuscule - τ - lettre/grecque/minuscule - "τ"  
 upsilon minuscule - υ - lettre/grecque/minuscule - "υ"  
 phi minuscule - φ - lettre/grecque/minuscule - "φ"  
 chi minuscule - χ - lettre/grecque/minuscule - "χ"  
 psi minuscule - ψ - lettre/grecque/minuscule - "ψ"  
 omega minuscule - ω - lettre/grecque/minuscule - "ω"  
 aleph - א - lettre/hébraïque - "א"  
 beth - ב - lettre/hébraïque - "ב"  
 vet - ו - lettre/hébraïque - "ו"  
 gimel - ג - lettre/hébraïque - "ג"  
 dalet - ד - lettre/hébraïque - "ד"  
 he - ה - lettre/hébraïque - "ה"  
 vav - ו - lettre/hébraïque - "ו"  
 zayin - ז - lettre/hébraïque - "ז"  
 het - ח - lettre/hébraïque - "ח"  
 tet - ט - lettre/hébraïque - "ט"  
 yod - י - lettre/hébraïque - "י"  
 kaf - כ - lettre/hébraïque - "כ"  
 khaf - כּ - lettre/hébraïque - "ך"  
 lamed - ל - lettre/hébraïque - "ל"  
 mem - מ - lettre/hébraïque - "מ"  
 nun - נ - lettre/hébraïque - "נ"  
 samech - ס - lettre/hébraïque - "ס"  
 ayin - ע - lettre/hébraïque - "ע"  
 pe - פ - lettre/hébraïque - "פ"  
 fe - פּ - lettre/hébraïque - "ף"  
 tsadi - צ - lettre/hébraïque - "צ"  
 qof - ק - lettre/hébraïque - "ק"  
 resh - ר - lettre/hébraïque - "ר"  
 shin - ש - lettre/hébraïque - "ש"  
 sin - שׁ - lettre/hébraïque - "שׁ"  
 tav - ת - lettre/hébraïque - "ת"  
 b cursif majuscule - B - lettre/cursive - "B"  
 e cursif majuscule - E - lettre/cursive - "E"  
 f cursif majuscule - F - lettre/cursive - "F"  
 h cursif majuscule - H - lettre/cursive - "H"

l cursif majuscule - ⠠⠠⠠ - lettre/cursive - "ℒ"  
 m cursif majuscule - ⠠⠠⠠ - lettre/cursive - "ℳ"  
 d cursif minuscule - ⠠⠠ - lettre/cursive - partial  
 e cursif minuscule - ⠠⠠ - lettre/cursive - "e"  
 l cursif minuscule - ⠠⠠ - lettre/cursive - "ℓ"  
 g cursif minuscule - ⠠⠠ - lettre/cursive - "g"  
 intégrale - ⠠⠠ - intégrale - int  
 intégrale double - ⠠⠠⠠ - intégrale - iint  
 intégrale triple - ⠠⠠⠠⠠ - intégrale - iiint  
 intégrale sur le contour - ⠠⠠ - intégrale - lint  
 intégrale de surface - ⠠⠠⠠ - intégrale - lrint  
 intégrale de volume - ⠠⠠⠠⠠ - intégrale - llrint  
 matrice () - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - left ( matrix {1#2##3#4} right )  
 matrice [] - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - left [ matrix {1#2##3#4} right ]  
 déterminant || - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - left lline matrix {1#2##3#4} right rline  
 norme ||| - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - left ldline matrix {1#2##3#4} right rdline  
 système d'équations - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - left lbrace stack {a#b} right none  
 tableau de variation - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - matrix {a#b##c#d}  
 tableau encadré - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - matrix {a#b##c#d}  
 tableau non encadré - ⠠⠠⠠⠠ - tableau - matrix {a#b##c#d}  
 colonne suivante - - tableau - #  
 ligne suivante - ⠠⠠ - tableau - ##  
 case vide - ⠠⠠ - tableau -

## Le menu interne de l'Esytme

Comme expliqué précédemment, l'Esytme est la combinaison d'un ordinateur et d'une plage braille. Il dispose d'un menu permettant de gérer indépendamment les réglages de la plage braille.

### Navigation dans le menu

L'entrée dans le menu se fait par une action Joystick 1 en haut ou par l'appui simultané des touches L1+L4.

On sort du menu ou d'un sous menu par l'action sur le bouton retour de fin de ligne, par l'appui de la commande braille Echap. (1245A), par l'action sur le titre du menu ou encore par les combinaisons clavier permettant d'entrer dans le menu.

Les menus sont très simples à manipuler, à l'aide des joysticks 1 ou 2 à droite et à gauche, il est possible de changer d'objet que l'on peut actionner.

Les joysticks 1 ou 2 en haut et en bas permettent de changer la valeur associée à un objet.

Les joysticks 1 ou 2 au centre permettent de faire l'action sur les boutons et d'entrer et de sortir de

l'édition des boîtes éditables. La combinaison braille 9A a le même effet.

Les touches routine-curseur ont aussi un effet sur les menus, elles valident les boutons, font changer les valeurs des zones de liste et permettent d'entrer ou de sortir des boîtes éditables.

Les touches L1 et L8 permettent de déplacer l'afficheur braille à droite ou à gauche.

## **Descriptif**

### **Menu Bluetooth**

#### *Alimentation : oui / non*

Ce paramètre indique si l'adaptateur Bluetooth est alimenté. Le changement de valeur prend effet de suite.

#### *Visible : oui / non*

Ce paramètre permet de savoir si l'adaptateur Bluetooth peut être détecté ou non par un autre système. Son changement de valeur prend effet de suite.

#### *Liste*

Ce bouton permet d'ouvrir un sous menu donnant la liste des jumelages mémorisés par l'adaptateur Bluetooth.

Après avoir choisi un périphérique vous pouvez voir pour quel type d'appareil l'Esystem Evolution se fait passer et modifier cette valeur. Les 2 boutons suivants permettent de modifier le nom du périphérique ou bien de le supprimer de la liste.

#### *Nom>Esys-...*

Cette boîte éritable permet de personnaliser le nom de l'adaptateur Bluetooth, pour être reconnu il doit toujours commencer par « esys- », c'est pour cela que les 5 premiers caractères du nom ne sont pas éditables.

#### *Paramètres d'usine*

Ce bouton permet de rétablir le module Bluetooth à ses paramètres de livraison.

Cette fonction dure plusieurs dizaines de secondes et se termine par l'affichage d'une boîte de dialogue indiquant si l'opération s'est bien déroulée. Dans le cas contraire n'hésitez pas à appeler Eurobraille.

### **Menu Clavier**

#### *Mode : Standard / Uni-manuel 1 / Uni-manuel2 / Uni-manuel 3 / Uni-manuel 4*

Pour des explications détaillées sur les 5 modes d'utilisation du clavier, voir le chapitre « le clavier uni-manuel ».

#### *Envoi USB-HID / Pilote*

Cette option permet de diriger les frappes de combinaisons au clavier braille vers une génération par l'interface USB-HID, comme le ferait un clavier de PC externe connecté en USB à l'appareil, ou de

transmettre un évènement clavier au pilote du PC qui assurera son transfert à l'application ou sa génération.

Ce paramètre peut être manipulé par le pilote et sa valeur affichée par le firmware correspond au mode de fonctionnement choisie.

## **Menu Localisation**

### *Langue : FR/UK/...*

Le paramètre langue définit le langage utilisé par le menu interne que nous décrivons actuellement.

### *Braille:French/German/...*

Le paramètre Braille définit la table braille utilisée par le menu interne que nous décrivons actuellement. C'est aussi ce paramètre qui définit le fonctionnement du clavier USB-HID.

## **Menu Outils**

### *Type USB : Esysuite / Esysuite-evolution / Esys*

Ce paramètre permet à l'Esysuite de se faire passer pour un Esys. Cela permet actuellement d'utiliser l'ensemble des logiciels avec lequel se connecte un Esys. En attendant que ces logiciels soient capables de reconnaître l'Esysuite Evolution.

### *Protocole Esysuite : Oui / Non*

Ce paramètre est surtout utilisé pour vérifier le mode de fonctionnement de l'afficheur, il doit présenter la valeur Oui lorsque l'Esysuite fonctionne avec Esysuite et la valeur Non dans le cas contraire. Il n'est pas recommandé de le changer.

### *Reset firmware*

**Ce bouton permet de provoquer un redémarrage du logiciel gérant la plage braille de l'esysuite. Cette fonction peut être utile en cas de perte de contrôle du système. Elle peut avoir des conséquences inattendues du fait que le logiciel perd la notion de son état courant.**